



Gamme Auto-Agrippante Echarpe pour bras

Gamme AUTO-AGRIPPANTE : gamme réunissant les principes du maintien et de l'immobilisation du patient au fauteuil. Elle assure le confort et le respect du patient, la sécurité dans l'utilisation et la facilité à mettre en place.



Echarpe pour bras						
Dimensions (en cm)*						
	a	b	c**	d	e	f
07.1618	34	25	140	27	41	20

*Dimensions données à titre indicatif
**Sangle desserrée au maximum

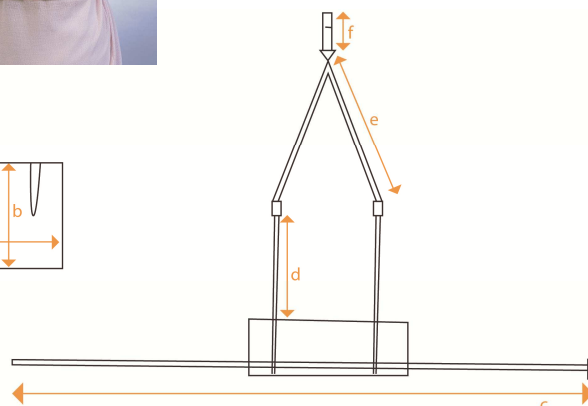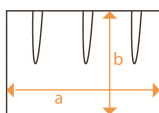

Conseils d'installation :

- 1) Placer le bras à immobiliser dans le manchon et fixer les bandes auto-agrippantes
- 2) Passer les sangles par dessus les épaules
- 3) Passer la sangle « c » autour de la taille la faire passer dans le passant de la lanière « f »
- 4) Passer le brin de sangle dans la boucle
- 5) Régler la sangle suivant la morphologie du patient

Composition :

- Maille grattée sur mousse Polyuréthane avec envers bouclette
 - Maille grattée : 100% Polyester
 - Mousse : 100% Polyuréthane - 20kg/m³
 - Bouclette : 80% Coton et 20% Polyamide
- Biais : 100% Coton
- Sangles: 100% Polypropylène
- Boucles : 100% Acétal
- Bandes auto-agrippantes: 100% Nylon

Entretien :



Séchage à l'air ambiant préconisé – Fermer les boucles avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.