


Attache-poignets et Attache-chevilles Fourrure

Attache-poignets et attache-chevilles Fourrure : ils permettent d'éviter les contusions et les blessures liées aux tentatives d'arrachement.

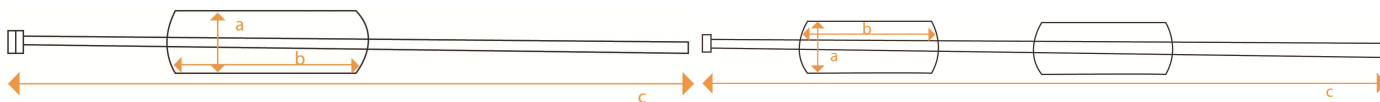

Attache-poignets			
	Dimensions (en cm)*		
	a	b	c**
07.1300	10	22	95

Attache-chevilles			
	Dimensions (en cm)*		
	a	b	c**
07.1310	10	30	260



*Dimensions données à titre indicatif **Sangle desserrée au maximum

Conseils d'installation :

1. Enrouler la bande de fourrure autour du poignet ou des chevilles et fixer les bandes auto-agrippantes
2. Pour les attache-poignets, passer les sangles sous les accoudoirs, puis dans la boucle et régler selon la morphologie du patient
Pour les attache-poignets, passer la sangle sous le matelas, puis dans la boucle et régler selon la morphologie du patient

Limite d'utilisation : Ne convient pas aux personnes très agitées

Composition :

- Fourrure : 100% Polyester
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon
- Sangles : 100% Polypropylène
- Boucles : 100% Acétal
- Vendu par paire

Entretien :



Fixer les bandes auto-agrippantes avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.