

Gamme Oxalis Gants de nuit

Gamme Oxalis : gamme de produits conçue pour répondre aux exigences de sécurité, de confort pour le patient et de maniabilité pour le personnel soignant.



Gants de nuit

07.1795

32 x 20 cm*

*Dimensions données à titre indicatif

Conseils d'installation

1. Enfiler le gant sur la main du patient.
2. Régler la tension de la sangle, fermer le clip sur le dessus du poignet.
3. Repositionner le brin de sangle sur les bandes auto-agrippantes

Composition :

- Tissu polyester sur ouate avec envers coton :
 - Tissu : 100% polyester
 - Ouate : 100% Polyester
 - Toile : 100% Coton
- Biais : 100 % Polyester
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon
- Sangles : 100% Polypropylène
- Boucles : 100% Acétal

Entretien :



Fixer les bandes auto-agrippantes et fermer les boucles avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.