

Gamme Oxalis

Harnais pour fauteuil roulant


Gamme Oxalis : gamme de produits conçue pour répondre aux exigences de sécurité, de confort pour le patient et de maniabilité pour le personnel soignant.



Harnais pour fauteuil roulant				
	Dimensions (en cm)*			
	a**	b**	c	d
07.1775	155	68	14	20

*Dimensions données à titre indicatif

**Sangle desserrée au maximum

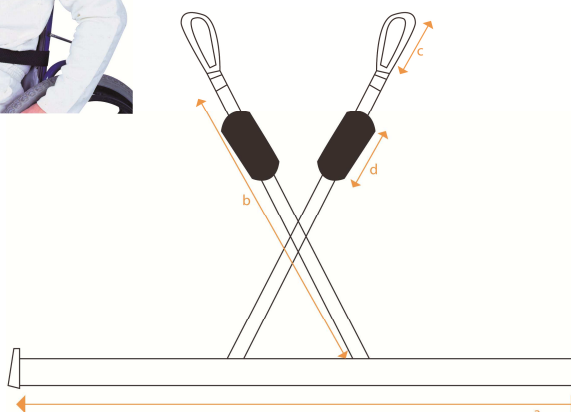

Conseils d'installation

1. Asseoir le patient sur le fauteuil.
2. Ouvrir le harnais à l'aide du clip.
3. Positionner le harnais, partie croisée devant, l'extrémité des bretelles enfilée
4. autour des poignées du fauteuil.
5. Refermer la ceinture en ayant soin de la passer sous les accoudoirs.
6. Régler la tension et la position de la ceinture à l'aide du brin de sangle.
7. Régler la tension des bretelles et bien positionner le néoprène sur les épaules.

Limite d'utilisation : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Pour tout type de fauteuil sauf fauteuil de type coquille.

Composition :

- Néoprène : Caoutchouc Chloroprène
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon
- Sangles : 100% Polypropylène
- Boucles : 100% Acétal

Entretien :



Retirer les bandes Néoprène avant le passage en machine.

Fixer les bandes auto-agrippantes et fermer les boucles avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.