

Le transfert en position allongée

Les aides techniques utilisées peuvent être souples ou rigides suivant les configurations des supports et la pathologie des patients. Le **Maxitrans®** et le **Trans'Gliss®** facilitent le transfert des patients lourds et difficiles à manipuler. Tous les systèmes proposés sont radiotransparents.

Les draps de glisse pour la translation

*Mode passif
2 opératrices*



Grace à l'utilisation du drap de translation, translater couché devient non pondérale



Préparation et étalement du drap de glisse



le drap est glissé le plus possible sous le corps du patient en position latérale

Les matelas molletonnés de transfert **Maxitrans®**, **Meditrans®**, **Minitrans®**

Ils sont constitués de nylon spécialement fabriqués et traités pour diminuer les frictions et apporter une qualité de glisse exceptionnelle pour tous les transferts entre des supports horizontaux de même niveau.

Le **Minitrans®**, peut être utilisé comme coussin pivotant par un mouvement rotatif de glisse sur lui-même. Il est conseillé en cas de lombagie et de prothèse de hanche et recommandé pour les personnes humides ou nues.



Minitrans®



Maxitrans®



Préparation du transfert



Le **Maxitrans®** glisse sur lui-même transversalement sur le plan d'allongement



Le transfert sur le lit est réalisé

*Mode passif
2 opératrices*

La planche de transfert rigide **Trans'Gliss®**

Utilisable pour tous les transferts entre les supports, même avec un dénivelé important et un espace entre les supports.

La planche de transfert **Trans'Gliss®** est radio-transparente. Les matériaux sont également très complémentaires et sélectionnés pour assurer une glisse exceptionnelle.

Plusieurs dimensions permettent de s'adapter à toutes les situations ; de l'utilisation par les premiers secours en ambulance, jusqu'aux transferts en bloc opératoire pour des patients avec perte de conscience.

Compacte, pliable et facile à transporter, aisée à nettoyer et à désinfecter, la planche de transfert est très appréciée.



Le patient est latéralisé afin de positionner le **Trans'Gliss®** au plus près du corps



Le patient est ramené sur le dos



Les soignantes favorisent le transfert par poussée rasante pour l'une et attitude enveloppante pour l'autre

*Mode passif
2 opératrices*