

Les coussins *Invacare Coussins de positionnement* sont des aides techniques à la posture pour aider à la prévention ou au traitement d'une escarre ou pour corriger ou prévenir une attitude viciée.

Composés de différents matériaux de haute qualité et recouvert d'une housse **Dartex**, cette gamme vous permettra de positionner tous types de patients selon sa sensibilité et son risque d'escarres. Il est recommandé d'alterner les postures toutes les 2/3 heures pour éviter les zones d'appui prolongées.

## Guide de choix

	Référence produit	Description	Dimensions d'encombrement			Poids	LPPR	Composition	
			Longueur	Largeur	Hauteur				
	1514992	<i>Invacare Oreiller cervical</i>	500 mm	350 mm	95 / 70 mm	2,2 kg	-	mousse viscoélastique 80 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Aides techniques à la posture en microbilles</b>									
	PC100B	<i>Invacare coussin universel</i>	600 mm	500 mm	150 mm	0,8 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	microbilles	
	PC150B	<i>Invacare Cale Universelle</i>	400 mm	250 mm	80 mm	0,19 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	microbilles	
	PC200B	<i>Invacare Bouée</i>	470 mm	380 mm	Ø 140 mm	0,5 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	microbilles	
	PC300B	<i>Invacare Décubitus</i>	2000 mm		Ø 180 mm	1,5 kg	<b>1220471</b> 173,79 €	microbilles	
	PC400B	<i>Invacare Demi-lune</i>	880 mm	880 mm	Ø 200 mm	1,6 kg	<b>1220471</b> 173,79 €	microbilles	
	PC600B	<i>Invacare Demi-Décubitus</i>	700 mm		Ø 150 mm	0,4 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	microbilles	
	PC700B	<i>Invacare Trapèze de positionnement</i>	500 mm	130 mm	250 mm	0,36 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	microbilles	
<b>Aides techniques à la posture en mousse viscoélastique</b>									
	PC100	<i>Invacare coussin universel</i>	600 mm	500 mm	200 mm	1,3 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	mousse viscoélastique 60 kg/m <sup>3</sup>	
	PC300	<i>Invacare Décubitus</i>	1600 mm	300 mm		1,6 kg	<b>1220471</b> 173,79 €	mousse viscoélastique 60 kg/m <sup>3</sup>	
	PC400	<i>Invacare Demi-lune</i>	2000 mm	200 mm	200 mm	2,3 kg	<b>1220471</b> 173,79 €	mousse viscoélastique 60 kg/m <sup>3</sup>	
	PC600	<i>Invacare Demi-Décubitus</i>	900 mm	300 mm	300 mm	0,9 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	mousse viscoélastique 60 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Aides techniques à la posture en mousse / gel</b>									
	OSW100/ BALT	<i>Invacare Cale de plicature</i>	850 mm	570 mm	110 mm	1,5 kg	<b>1220471</b> 173,79 €	Mousse HR 40 kg/m <sup>3</sup>	
	HP50 HP100	<i>Invacare Cale talon</i>	480 mm	320 mm 620 mm	50 mm	1,5 kg 3 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	Mousse HR 40 kg/m <sup>3</sup> + insert de gel	 
	MLT/S MLT/M MLT/L	<i>Invacare Talonnière</i>	510 mm 610 mm 660 mm		115 mm	0,7 kg 0,75 kg 0,8 kg	<b>1269224</b> 129,58 €	Mousse HR 40 kg/m <sup>3</sup>	

## Les matériaux

Large choix de coussins dans différentes matières pour répondre à tous les besoins.



### Microbilles

#### Microbilles

Polystyrène expansé très facile à manipuler, très léger. Pour une mise en posture courte.



### Visco

#### Mousse viscoélastique

Favorise l'immersion dans le support assurant une excellente prévention d'escarres. Très confortable.



### Mousse

#### Mousse HR

Très confortable. Positionnement stable.



### Gel

#### Gel fluide

Favorise l'immersion dans le support.

## Les Aides Techniques à la Posture



#### Décubitus

- Idéal pour mise en position semi-latéral 30° en position allongée pour assurer une décharge totale du sacrum en cas d'escarre déclarée.
- Permet de positionner le patient avec soutien de la tête jusqu'aux genoux pour libérer les points d'appuis au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.



#### Cale talon

- Immersion des zones à risque dans le gel, des talons et des coudes pour augmenter la zone de contact et limiter les points d'appuis dans le cadre de la prévention des escarres.
- Favorise le retour veineux car légère inclinaison du coussin.



#### Demi-lune

- Préviend les risques de chute de lit.
- Assure un bon maintien au niveau de la tête et des coudes.
- Utilisation combinée avec cale plicature et cales talons pour assurer une alternative aux lits médicalisés.



#### Cousin universel

- Maintien de la tête.
- Utilisation au niveau des mollets pour décharge talonnière.
- Utilisation au niveau des coudes pour mise en décharge.



#### Cale plicature

- Recommandé par les experts pour assurer une décharge au niveau des talons dans le cadre de la prévention des escarres.
- Limite les effets de glissement vers le pied de lit et donc limite les effets de friction et cisaillement.
- Alternative à l'utilisation de lits non médicalisés.



#### Trapèze de positionnement

- Cale de plicature pour les genoux
- Cale de positionnement multi-positions
- Dispositif microbilles permettant de positionner une personne allongée à 30° d'inclinaison latérale



#### Cale universelle

- Utilisation au niveau des mollets pour décharge talonnière et au niveau des coudes pour mise en décharge
- Composition : microbilles
- Soulagement des points d'appui et positionnement du bassin en fauteuil roulant



#### Bouée

- Maintien au niveau de la tête pour soulager les lombaires.
- Décharge au niveau du sacrum.
- Utilisation combinée avec le coussin demi-décubitus pour réduire les appuis exercés au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.

#### Demi-décubitus

- Décharge du talon.
- Utilisation combinée avec le coussin bouée pour réduire les appuis exercés au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.
- Maintien de la tête.
- Position semi-latéral 30° en position allongée pour les personnes de petite taille.



#### Talonnrière

- Décharge totale du talon.
- Mise en proclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.
- Bon maintien de la jambe grâce aux 2 sangles.
- Limite le risque de luxation en cas de prothèse de hanche.

## Les positionnements

### Positionnement en DECUBITUS DORSAL

- Prévention des escarres talonnières et au niveau du sacrum, des ischions, des coudes et de l'occiput.




### Exemples




### Positionnement SEMI-FOWLER

- Prévention des escarres talonnières et au niveau des coudes.
- Particulièrement recommandé sur un lit dépourvu de la fonction plicature.
- Posture réalisée en relevant le dossier du lit à 30°.

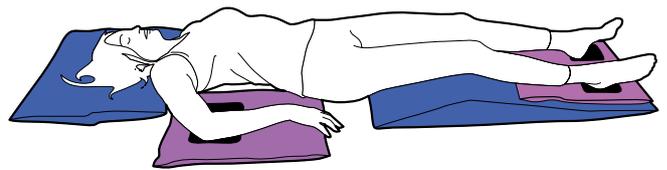

**Semi-Fowler 30° - 30°**


### Exemples

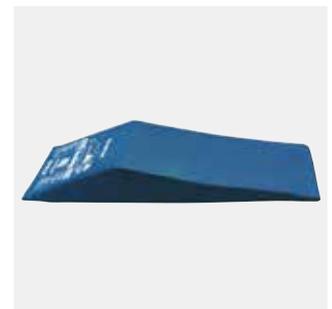

## Les positionnements

### Positionnement DECUBITUS SEMI LATERAL à 30°

- Prévention des escarres sacrées (sacrum, trochanters) en reportant les pressions sur des zones à moindre risque (bassin)
- Soutien de la cuisse du côté surélevé, évidement de la zone du sacrum

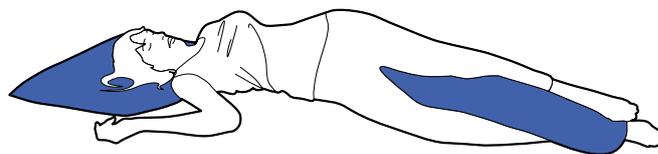

#### Exemples



### Positionnement DECUBITUS SEMI VENTRAL à 135°



#### Exemples



### Invacare Oreiller Cervical 1514992

Oreiller qui favorise le **relâchement** musculaire, le **confort** et le **soutien** de la tête, procure un **sommeil réparateur**.

- Oreiller en mousse viscoélastique de 80 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse et Housse hypoallergéniques et respirantes
- Dimensions : L 500 mm x l 350 mm x H 95/70 mm
- Indications : dorsalgies, cervicalgies, arthrose cervicale, douleurs post-traumatiques



#### Prescription



#### Prescription – Renouvellement annuel 1220471

Mr ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin Invacare X de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux.

#### 1269224

Mr ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin Invacare X de série de positionnement, modulaire, Base du coussin modulaire.



#### Entretien quotidien

Utilisation de lingettes avec détergents habituels pour nettoyage quotidien.

#### Normes :

**EN NF 597** parties 1 et 2: Résistance au feu  
**ISO 1420**: Test de la colonne d'eau  
**EN NF 10993-5**: Biocompatibilité