

ARJO

MAXI SKY¹⁰⁰⁰

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES
SYSTÈMES DE LÈVE-PATIENTS
SUSPENDUS POUR OBESES






La population obèse étant en pleine croissance, cela veut dire que les dispositions prises pour les soins de ces patients et de ces résidents deviennent de plus en plus problématiques dans un grand nombre d'établissements de soins. Le levage manuel des personnes de poids moyen est une cause majeure des blessures et des troubles musculo-squelettiques liés au travail, et ces risques augmentent pour le personnel qui doit manipuler les patients obèses. Pour protéger le personnel, il est crucial d'utiliser des aides mécanisées et des méthodes de travail correctes. Les soins pour personnes obèses exigent des conditions spéciales adaptées aux diverses tranches de poids.

Les patients obèses sont en droit d'être traités avec le même confort, le même respect de dignité et de pudeur que les autres. Les lève-patients suspendus sont des aides éprouvées à la manipulation des patients qui satisfont à ces critères, et grâce au *Maxi Sky¹⁰⁰⁰*, il est désormais possible de faire profiter les patients obèses de ces avantages.


Le *Maxi Sky¹⁰⁰⁰* constitue un système de lève-patient suspendu complet spécifiquement conçu pour faciliter le transfert sûr et dans le respect de la dignité des personnes obèses dépendantes. Ce système sophistiqué et facile à exploiter permet à un seul soignant d'effectuer des transferts à l'aide d'une télécommande, et cela sans stress ni effort, et sans levage manuel.

- **CAPACITÉ DE LEVAGE DE 455 KG** à partir d'une seule cassette avec un berceau mobile exclusif, conçu pour les patients obèses qui simplifie son exploitation par le soignant, ce qui lui donne donc la possibilité de faire face à toutes les situations de levage passif. La conception exclusive pour un large espace et l'angle des points de fixation du berceau mobile permettent de soulever le patient dans une position confortable.
- **DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE:** L'appareil est toujours prêt à l'emploi. Après les transferts, la cassette de levage est ramenée au poste de charge encliquetable, qui peut être placée à n'importe quel endroit du rail (il existe en option, un dispositif de retour automatique au poste de charge).
- **DISPOSITIFS DE PROTECTION INCORPORÉS:** Divers dispositifs tels que frein, système de descente et arrêt d'urgence à interrupteur à cordon, garantissent la sécurité du client en cas d'urgence. Afin de maximiser la durée de vie des batteries, un limiteur de courant empêche l'utilisation du lève-patient si les batteries sont déchargées.
- **FONCTIONNEMENT ET COMMANDES SANS À-COUPS:** Les boutons de la télécommande situés sur le devant de la cassette sont facilement accessibles. Les fonctions démarrage et arrêt progressif permettent au soignant de s'assurer que le lève-patient peut toujours être arrêté sans à-coups, en toute sécurité et exactement à la position requise.
- **ENTRETIEN SIMPLE:** Un indicateur rouge sur la cassette du lève-patient avertit le soignant qu'il faut effectuer la recharge de l'appareil. En raison de sa conception modulaire, il suffit d'encliqueter les composants de rechange en place.

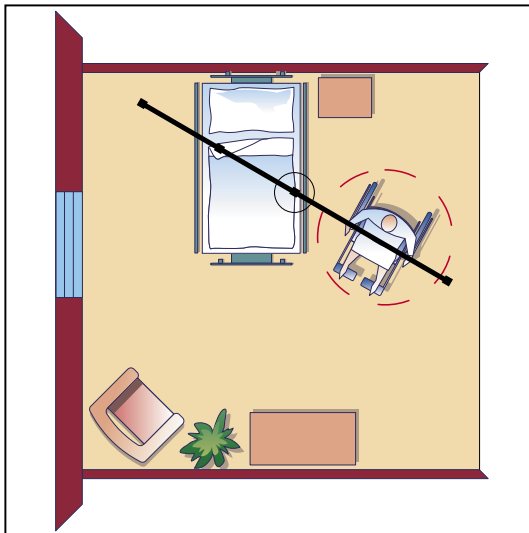


AGENCEMENT: La configuration simple des rails offre une couverture idéale pour le transfert dans les chambres.


HARNAIS FORTE CORPULENCE: Il est possible de fixer toute une série de harnais à boucles pour obèses sur le berceau mobile.

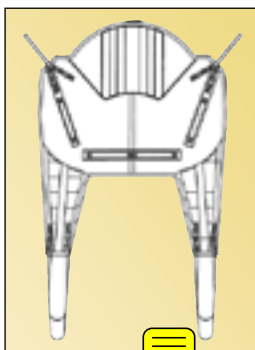


La **GAMME DE LUXE** comporte un matériau renforcé et des piqûres dans les parties du harnais soumises aux plus grandes contraintes, notamment les épaules, les jambes et la colonne vertébrale. Le rembourrage supplémentaire assure un confort accru tout en diminuant la pression sur les peaux délicates, et un renfort dans les jambières afin d'empêcher l'enroulement autour des jambes, tout cela augmentant donc le confort du patient.

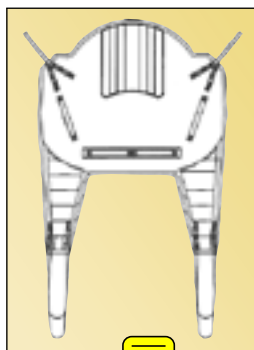

La **GAMME DE** procure un système de la même forme et de la même conception à un prix modéré. Il comporte un rembourrage standard au niveau des jambes sans renfort de piqûres ni de matériau. Le confort et la sécurité restent toujours au premier rang de nos priorités.

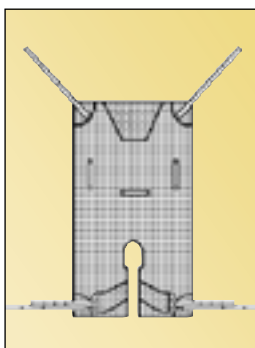

La **GAMME DE LUXE HAUTE À DIVISION DES JAMBES** est parfois préférable pour les patients dont la morphologie est en forme de poire. L'estomac de ces patients est plus proéminent et exige plus de support. L'ensemble du harnais est rembourré de tissu Spacer qui est plus doux, et disperse la chaleur, ce qui évite une accumulation de la chaleur et de la transpiration corporelles, et augmente donc le confort et la protection de la peau.

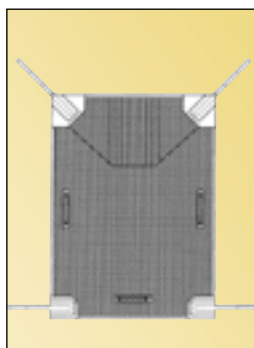

La **GAMME DE BAS** adopte la même conception que la gamme De Luxe, mais sans dispositif de division des jambes. En raison du prix inférieur du matériau, cette gamme constitue une solution plus économique.



RAIL OU PORTIQUE? La cassette de levage peut être installée sur un portique ou sur un rail permanent droit monté au plafond. Un portique constitue une installation semi-permanente présentant une grande souplesse, car le système peut être déplacé là où il le faut.

PÈSE-PERSONNE EN OPTION: Le Maxi Sky100 est disponible avec un pèse-personne jusqu'à 455 kg en option.




CHARGÉ ET PRÊT: Il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour déplacer la cassette de levage vers le poste de charge (en option).

La **TÉLÉCOMMANDE** ergonomique comporte de gros boutons à effleurement saillants afin de pouvoir facilement utiliser le lève-patient suspendu.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Espace requis

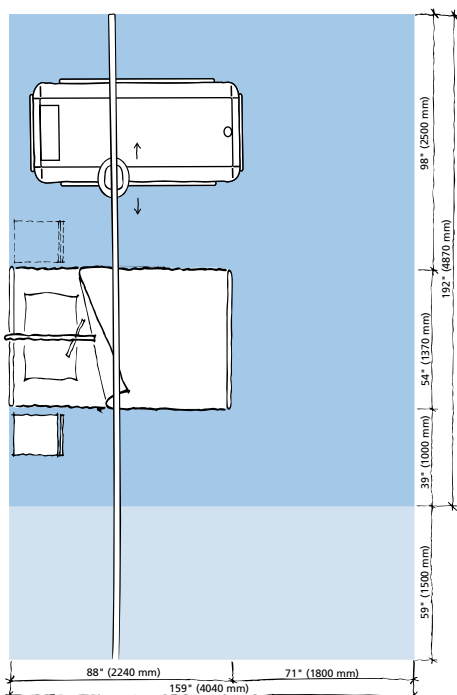

La zone bleue indique l'espace requis pour pouvoir utiliser correctement les aides techniques.

La zone en bleu clair indique la surface supplémentaire requise pour faciliter les activités des deux côtés du lit.

Le *Maxi Sky¹⁰⁰⁰* fait partie de la gamme complète de lève-patients *Maxi Sky* d'ARJO qui comprend le *modèle 600*, un lève-patient suspendu fixe pour les transferts courants, et le *modèle 440*, un lève-patient suspendu portable...

Maison des résidents obèses

Approprié à Calvin, Diana et Ella



C Calvin, assis dans un fauteuil roulant et qui peut partiellement soutenir son poids sur au moins une jambe

D Diana, qui ne peut pas se soutenir

E Ella, presque complètement grabataire et dépendante

Please contact ARJO for further information on the Mobility Gallery™.

Information produit

Capacité de levage 455 kg

Poids de l'appareil (piles comprises) 22 kg

Fonctions de démarrage et d'arrêt progressifs

Voyant sous tension

Voyant LED signalant le besoin d'entretien

Voyant de faible charge de pile (sonore et LED visuelle)

Fonction de descente d'urgence manuelle (située sur le boîtier du moteur)

Boutons électriques de levage et de descente d'urgence situés sur la cassette

Dispositif d'arrêt d'urgence (interrupteur à cordon) accessible à partir du sol

Voyants de charge: - clignotement jaune – en charge
- jaune permanent – charge terminée

Double système de frein d'urgence centrifuge (en cas de panne mécanique)

Longueur de sangle jusqu'à 2,3 m testée pour un poids de 2 275 kg

Vitesse de levage: 3 cm/s à 450 kg
4 cm/s à 230 kg
6 cm/s à 0 kg

Batteries : 2 x 7 Ah donnant un fonctionnement moyen de 80 transferts sous charge de 230 kg et jusqu'à 25 transferts sous charge de 450 kg.

Vitesse de déplacement horizontal réglable : 10, 14, 16, 20 cm/s.
Vitesse par défaut : 16 cm/s

Retour automatique vers la fonction de charge déclenchée par l'utilisateur (en option): coupure par détecteur de poids à 9 kg.

Boîtier ABS FR (ignifuge)

Certifications CSA No 601.1 et UL No 2601-1

Marquage CE / ISO 10535

Chargeur

Voyant sous tension sur module de charge

Chargeur à accrocher à n'importe quel endroit du rail

100-240 V c.a. / 50-60 Hz / 27 Va

Isolement catégorie 2

Télécommande

ABS ignifuge

Boutons à effleurement Santopren / IP44

Seules les pièces détachées ARJO, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires ARJO, pour éviter toutes blessures. Les conditions de vente ARJO comprennent des dispositions spécifiques confirmant que, dans ce cas, elle décline toute responsabilité. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis.

Maxi Sky et la Maison des résidents sont des marques déposées de Arjo International AG

ARJO

...la Technologie au Cœur de l'Homme.

Arjo Equipements Hospitaliers

45 avenue de l'Europe
Eurocit BP 133
59436 RONCQ Cedex
FRANCE
Tél.: 03 20 28 13 13
Fax: 03 20 28 13 14
E-mail: info@arjo.fr
www.arjo.com



Arjo Hospital Equipment Sa

Ternesselei 248
2160 Wommelgem
BELGIQUE
Tél.: 03 353 91 00
Fax: 03 353 91 01
E-mail: info@arjo.be
www.arjo.com

Arjo / Gestion Techno-Médic

6900 Ave. Choquette
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 8L1
CANADA
Sans frais: 1-800-665-4831
Sans frais
télécopieur: 1-800-309-1116
E-mail: info@arjo.ca
www.arjo.com