

VERTICALISATEUR STELLA

Pour que certains transferts deviennent moins pénibles



Le nouveau verticalisateur STELLA de SCEMED est une avancée importante dans l'amélioration des conditions de travail et dans la sécurité en Hôpitaux, Maisons de retraite et Etablissements de santé où les transferts sont nécessaires et les transferts debout possibles.

- La conception particulièrement bien pensée offre un maximum de confort et de sécurité aux personnes transférées. Ce système de transfert est utilisé pour les personnes qui peuvent participer à leur transfert.
- Le plus grand soin apporté au design et à la haute qualité de fabrication augmente le sentiment de bien-être et de sécurité pour les utilisateurs.
- Le STELLA est un verticalisateur entièrement électrique, à savoir que la montée et la descente du bras de levage et l'écartement du piètement sont actionnées automatiquement à partir de la télécommande.
- Les roulettes de très hautes qualités, à faible résistance au roulement, assurent une manœuvrabilité facile du matériel.

 **SCEMED**


L'HYGIENE, SOURCE DE VIE

VERTICALISATEUR STELLA



NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION AUTOMATIQUE DES SANGLES DU HARNAIS (BREVET)

- Les sangles du harnais sont enfilées aux crochets en position ouverte.
- Ensuite, la conception du crochet, fait que le poids de la personne, voire que le poids du harnais, actionne la fermeture des crochets. Le harnais est parfaitement sécurisé.
- Pour enlever le harnais il suffit de soulever les sangles pour les libérer du crochet.

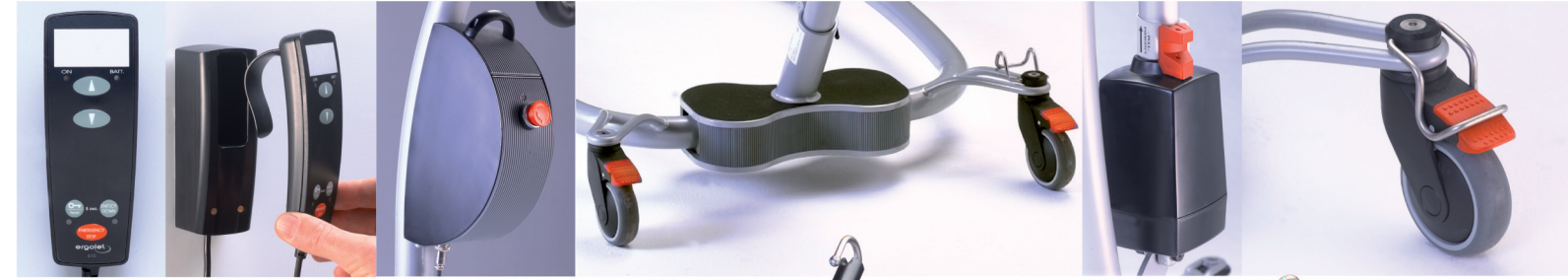

CARACTERISTIQUES

■ Fonctionnement :

- Montée/descente électrique.
- Ouverture/fermeture électrique du piètement.
- Fonction Marche/Arrêt automatique.
- Démarrage progressif du bras de levage.
- Appuis genoux ajustables en hauteur et en inclinaison.
- Repose pieds et appuis genoux amovibles.

■ Batterie :

- Batterie 36V-2,9Ah Batterie gel étanche sans entretien.

■ Chargeur de batteries :

- Chargeur incorporé, 100-240V, 50-60 HZ, max 400mA.

■ Recharge de la batterie :

- Si la tension de la batterie est faible un témoin lumineux jaune/orange s'allume, la batterie doit être rechargée, il est encore possible de faire quelques transferts.
 - Si le témoin est de couleur rouge la batterie devra être immédiatement rechargée.
- Pour garder la durée de vie maximale de la batterie il est recommandé de la recharger régulièrement. La recharge maximale est atteinte en 8 heures.

■ 2 procédés de chargement sont possibles :

- En branchant la télécommande au support mural relié au secteur (100-240V).
- En retirant la batterie de son coffret et en la plaçant dans le chargeur mural.
- Pendant la recharge de la batterie un témoin lumineux bleu est allumé.

■ Système d'arrêt d'urgence

■ Descente d'urgence du bras de lavage



VERTICALISATEUR STELLA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur/largeur du piètement :80/69cm
- Ecartement du piètement (mini/max)65/100cm
- Poids total46.5kg
- Capacité de levage150kg
- Débattement du bras de levage72/173cm
- Vitesse de fonctionnement : - à vide62mm/sec
- en charge (80kg)15mm/sec en montée - 23mm/sec en descente
- Démarrage et arrêt progressif du bras de levage
- Roulettes avant pivotantes de Diamètre75mm
- Roulettes arrière pivotantes à frein dont 1 avec blocage directionnel de Diamètre100mm

VERTICALISATEUR STELLA ...Réf.: ERG010-01301

ACCESSOIRES

- Chargeur de batterie mural ①Réf. : ERG015-01961
- Batterie supplémentaire ②Réf. : ERG250-02101

SANGLES

- Les sangles SCEMED pour verticalisateur sont conçues en collaboration avec des ergothérapeutes pour être le plus fonctionnel possible.
- Ces sangles sont conçues pour verticaliser la personne. L'intérieur de la sangle possède une ceinture participant à la sécurité et au confort du transfert.
- L'intérieur de certaines sangles possèdent un revêtement antiglissement.
- Les sangles pour verticalisateur existent en plusieurs tailles. Il faut choisir la bonne taille correspondante à la personne pour un agréable confort et une parfaite sécurité.
- Le tissu dans lequel sont confectionnées nos sangles est un textile très résistant et facile à nettoyer.
- Chaque sangle possède son étiquette d'identification sur laquelle sont notées les informations relatives à son utilisation et à son entretien.



SCEMED la marque de la Société SCLESSIN PRODUCTIONS
pour les matériels d'Hygiène, Transfert et Désinfection.

2, RUE DE BUENOS-AIRES B.P.274 - 59335 TOURCOING CEDEX
TEL : 03 20 28 04 28 FAX : 03 20 28 04 00
E-mail : contact@sclessin.com

www.scemed.com