

MAINTENANCE

Nos potences sur pied ou avec système d'accrochage ne nécessitent aucun entretien particulier, mis à part que le fabricant recommande de contrôler régulièrement la structure.

Contrôlez que les tubes sont bien positionnés, vérifiez les raccords, les fixations et que les vis et / ou les attaches sont bien serrées.

NETTOYAGE

Utilisez les détergents habituels avec un chiffon humide et essuyez immédiatement.

Pour un nettoyage en profondeur, le fabricant recommande d'utiliser du MENTOSAN® qui est distribué par nos revendeurs.

SECURITE



- Vérifiez que la potence est en bonne position, et selon le modèle, qu'elle est fixée au lit ou qu'elle repose sur une surface plane.
- Faites les réglages avant utilisation de la potence.
- Vérifiez que la corde et la poignée de levage sont bien fixées.
- Ajustez la longueur de la corde pour faciliter au maximum l'accessibilité du patient.
- Aidez toujours le patient lors du levage.
- Soyez très vigilant si vous utilisez un dossier manuel ou électrique pour aider à soulever le patient.
- Ne trafiquez pas et ne modifiez pas une partie de la potence.
- Ne dépassez pas la **capacité de levage maximale de 80 kg**.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages provenant d'une utilisation incorrecte du matériel ou d'une utilisation non prévue dans le présent manuel.

ENTRETIEN

Si un élément qui n'est pas normalement vérifié dans le cadre de la maintenance habituelle se détériore, prenez contact avec votre distributeur ou directement avec INVACARE → MECC SAN → s.r.l. Nos techniciens sont

INVACARE → MECC SAN → s.r.l. - via dei Pini, 62 - 36016 Thiene (VI) - ITALY

Consignes d'utilisation - Potence avec système d'accrochage - ID : Ma04I-0305

à votre disposition pour vous fournir tout conseil suite à un problème pouvant survenir.

NOTE : Les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Il est interdit de photocopier ou de traduire le document ou une partie de celui-ci sans l'autorisation de MECC SAN®.

INVACARE → MECC SAN → s.r.l.




COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =



Consignes d'utilisation de la potence

cod. 935660.1

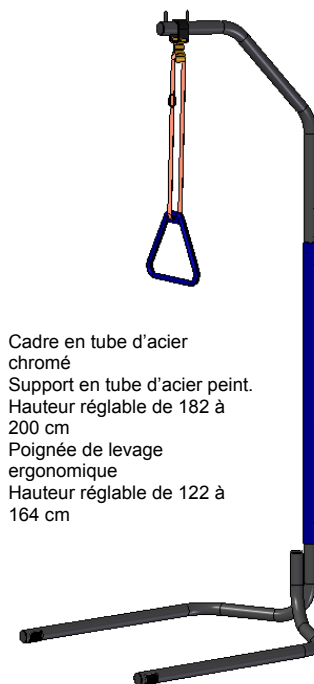


Cadre en tube d'acier chromé
Support en tube d'acier peint.
Hauteur réglable de 182 à 200 cm
Poignée de levage ergonomique
Hauteur réglable de 122 à 164 cm

Capacité Max **80 kg** Poids **7kg**

Prodotto conforme
INVACARE → MECC SAN → s.r.l. - via d

pag 4 Consignes d'utilisation - Potence
avec système d'accrochage - ID: Ma04I-0305

cod 935650.1

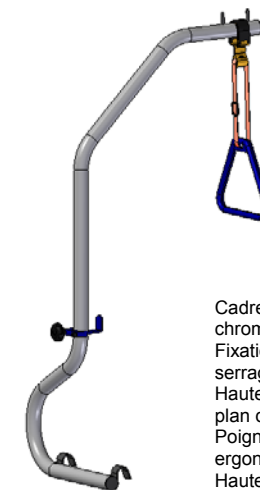

Cadre en tube d'acier chromé
Fixation par bride de serrage
Hauteur 120 cm à partir du plan du lit
Poignée de levage ergonomique
Hauteur réglable de 65 à 90 cm à partir du plan du

Capacité max **80 kg** Poids **4 kg**



2 - 36016 Thiene (VI)