



LES + PRODUIT

Languette latérale inclinable favorisant le passage et procurant un confort .

Deux bandes antidérapantes sur la face inférieure.

Poignées ergonomiques permettant une préhension respectant la « pince » de la main.

Légère et souple, grâce à sa faible épaisseur.

OPTIONS

GERIA-MAX



OLIVIA



MULTIGLIDE



Peut être associée avec une sangle de transfert GERIA-MAX® ou OLIVIA® ou avec un drap MULTIGLIDE® pour les transferts de personnes nues.

PLANCHE DE TRANSFERT ARTICULÉE

RÉFÉRENCE
SIIM404

La planche de transfert REGLISSE® est composée d'une surface lisse et glissante et de deux bandes antidérapantes sur la face inférieure.

Positionnée entre deux plans assis, de même niveau ou non, elle permet à son utilisateur de glisser, d'une assise à l'autre, de façon autonome ou accompagnée.

La languette inclinable favorise le passage de la roue du fauteuil et procure un confort pour guider le bassin.

Son poids très léger est adapté pour faciliter la mise en place autant pour l'aidant que pour l'aidé.

On peut aussi l'utiliser pour les transferts voiture-fauteuil, fauteuil-toilette...

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme "Planche de transfert" est composée de 7 modèles différents par la forme et les dimensions ■



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTÉ

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	REGLISSE®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT ARTICULÉE
RÉFÉRENCE :	SIIM404
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012511778
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	800 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé. Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'aidé. Positionner le plan de départ à un angle de 30 ° / 40 ° par rapport au plan d'arrivée. Les bandes antidérapantes doivent être séchées avant d'être utilisées. Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux cotés et que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés. Avant le transfert, s'assurer que l'aidé n'a pas la peau pincée par la planche.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, la planche REGLISSE® ne doit pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polyéthylène.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant une planche de transfert REGLISSE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Noir.
DIMENSIONS :	60 x 33 x 0,7 cm