

ASSOCIABLE À UNE PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE : SIIM60



Le carré MULTIGLIDE®, placé sur une planche de transfert, permet de faciliter le transfert d'un patient d'une assise à l'autre à forte charge pondérale, à faibles capacités ou encore le transfert d'une personne nue.

Désinfectable facilement, il peut être utilisé pour plusieurs patients dans une même journée.

L'effet de glisse allège la charge de travail des soignants.

Il est traité face externe pour adhérer au patient et face interne pour glisser.

LES PRODUIT

Il contribue à la **prévention des escarres** en évitant les cisaillements.

Le carré MULTIGLIDE® permet de **prévenir les lombalgies** en allégeant de 60% l'effort des soignants.

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
Une **qualité expertisée** depuis 25 ans.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	CARRÉ MULTIGLIDE®
DESCRIPTION COURTE :	ASSOCIABLE À UNE PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIIM60
DATE DE MISE À JOUR :	16/11/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012499205
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	100 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	300 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne pour faciliter un transfert assis-assis avec une planche de transfert.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, le carré MULTIGLIDE® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante. Ne pas laisser un patient seul sur le drap.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Le procédé de lavage suivant doit être utilisé : <ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 80° en machine. • Séchage à 60° maximum. • Lavage à la main, trempage et essuyage. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Nylon contre laqué à 160° avec enduction polyuréthane et laquage en fluo carbone.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant 1 carré MULTIGLIDE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert.