


QU4TTROTM acute

Le Qu4ttroTM Acute est un matelas de prévention et de traitement des escarres. Il est particulièrement adapté aux patients à très haut risque et à mobilité réduite, et répond aux besoins les plus pointus du milieu hospitalier.

Escarre jusqu'au stade IV

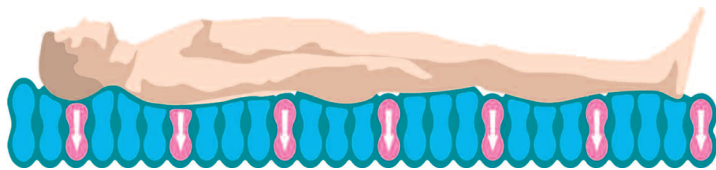

La QU4TTRO[®] therapy - réduction de la pression, pressions d'interface plus basses et confort amélioré,

cliniquement prouvé. Durant le cycle actif 1 sur 4, le patient est constamment supporté sur au moins 75% de la surface du matelas quand la pression est réduite sur 25% du corps. Cela procure un plus haut niveau de confort et des pressions de surface plus basses, comparées aux systèmes à cycles 1/2 ou 1/3.




La caractéristique ODSTM (Ortho-Differential Support) de ces cellules permet d'obtenir des pressions optimales à l'intérieur des cellules, compensant automatiquement les différents IMC des patients.

Plus étroites au centre qu'aux extrémités, elles s'adaptent aux différents patients, et contiennent un différentiel de pression et de soutien intégré, permettant de supporter les patients les plus petits et légers sur la partie la plus souple au centre, et les patients les plus lourds et larges sur les extrémités.



La Thérapie Basse Pression Continue, répartition optimale de la pression.

En mode thérapeutique Basse Pression Continue, la pression est égalisée à l'intérieur des cellules, permettant une meilleure immersion à la surface du matelas et une répartition optimale de la pression..

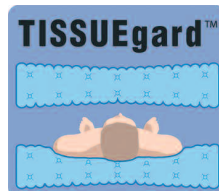

Les cellules TISSUEgardTM sont uniques à TALLEY MEDICAL. Leur surface plissée apporte 15% en plus de surface d'appui, permettant au patient de s'immerger dans le matelas, éliminant ainsi les tensions latérales de surface. Cela entraîne la réduction des pressions de surface, des forces de cisaillement et de frottement et rend inutile le besoin d'une zone talons.




AUTOsupportTM - Ajustement automatisé de la pression :


La pression est ajustée automatiquement tout au long du cycle de telle manière que le soutien, la position et la thérapie soient toujours maintenus à des niveaux optimaux, en réponse au poids, aux mouvements et à la position du patient. L'égalisation de la pression des cellules se fait automatiquement sans aucune intervention.



DEEP CELL THERAPYTM - des pressions d'interface de 30 mmHg ou moins :

Les cellules TISSUEgardTM combinées aux 24 cm du matelas QU4TTRO[®] Acute et à la QU4TTRO[®] Therapy garantissent des pressions extrêmement basses dans les cellules gonflées. Dans le mode actif les pressions dans les cellules gonflées sont toujours de moins de 30 mmHg durant 100% du cycle, ce qui est bien inférieur aux autres dispositifs du marché. Cela procure également un meilleur confort et une meilleure qualité de sommeil pour le patient.

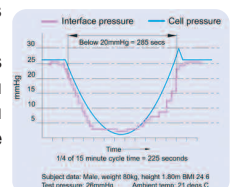

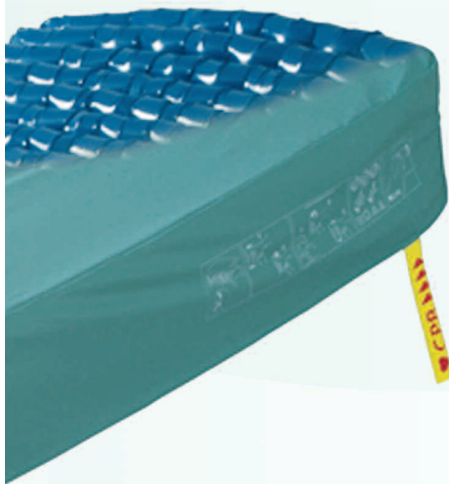

Fonctionnement intuitif. Des boutons tactiles simples et concis et une fonction verrouillage automatique pour éviter toute activation involontaire. Des alarmes sonores ainsi qu'un écran LCD montrant les différents modes en cours ou les erreurs de fonctionnement.

Mode soins - Gonflage maximum. Gonfle le matelas à la pression statique maximale pour 15 minutes avant de revenir au mode thérapeutique précédent, nécessaire pour certains soins quand un mode actif ne convient pas.




Réglages de confort. Permet au soignant d'adapter les réglages de confort, quelque soit le mode thérapeutique choisi, pour s'accommoder au ressenti du patient. Trois réglages disponibles : Tendre - Median - Ferme.

Valve CPR. Une valve de dégonflage rapide et efficace clairement identifiée permet de vider le matelas en quelques secondes pour permettre le massage cardiaque.

PHASE FLOW™ - Economie d'énergie.

La pompe de contrôle de la pression ne fonctionne que selon les besoins, réduisant la consommation d'énergie, le bruit et retardant les besoins en maintenance.

Economie d'énergie

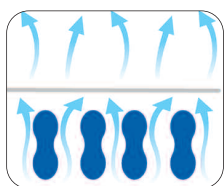

Perte d'air interne : Pendant chaque cycle, de l'air est libéré à l'intérieur du matelas, sous la housse, grâce à un réseau spécifique. Cette ventilation mécanique réduit l'humidité et aide à conserver une température ambiante au niveau de la peau du patient.

Intégralement lavable en machine.

Le matelas est intégralement lavable en machine à 70°C, sans démontage.



Design, solidité, ergonomie. Les produits TALLEY® sont tous développés en interne avec un souci de solidité et d'efficacité : passe-cable sur la housse, tuyaux interne anti-plis, housses soudées, sangles d'attaches, boîtier ABS, ... Une utilisation efficace garantie sur la durée.


Version pédiatrique.

L'ensemble Qu4ttro® Acute existe dans une version pédiatrique



Mode transport.

Assure le support du patient, même sans alimentation, jusqu'à 12h.

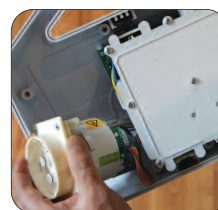

Construction modulaire.

En 4 blocs. Simple à réparer. Maintenance facilitée pour les clients.

-   **Idéal pour l'hôpital et les institutions**
-  **Pour patients à très haut risque Jusqu'au stade IV**
-  **Deux modes Actif 1 cellule / 4 Mode basse pression continue**
-  **Toujours moins de 30 mmHg de pression**
-  **AUTOsupport™ Ajustement de la pression automatique**
-  **TISSUEgard™ Cellules exclusives avec support ODS™**
-  **Perte d'air intégrée**
-  **Mode confort**
-  **PHASE FLOW™ Economie énergie**
-  **Alarmes visuelles et sonores**
-  **Autoverrouillage du clavier**
-  **Matelas entièrement lavable en machine**
-  **Valve CPR**
-  **Gonflage max. Mode soins**
-  **Mode transport jusqu'à 12h**
-  **Tissu imperméable et respirant**
-  **Coutures soudées**
-  **Passer-cable**
-  **Modulaire maintenance facile**
-  **2 ans de garantie**