


QUATTROTM overlay

Le Qu4ttroTM Overlay est un sur-matelas de prévention et de traitement des escarres. Il est particulièrement adapté aux patients à haut risque et à mobilité réduite, et répond aux besoins hospitaliers ou pour l'HAD.

Escarre jusqu'au stade III et (IV)

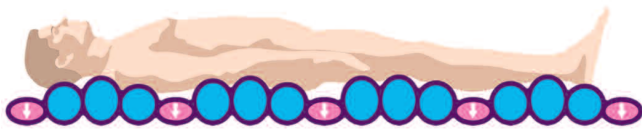

La QUATTRO[®] therapy - réduction de la pression, pressions d'interface plus basses et confort amélioré,

cliniquement prouvé. Durant le cycle actif 1 sur 4, le patient est constamment supporté sur au moins 75% de la surface du matelas

quand la pression est réduite sur 25% du corps. Cela procure un plus haut niveau de confort et des pressions de surface plus basses, comparées aux systèmes à cycles 1/2 ou 1/3.



La Thérapie Basse Pression Continue, répartition optimale de la pression.

En mode thérapeutique Basse Pression Continue, la pression est égalisée à l'intérieur des cellules, permettant une meilleure immersion à la surface du matelas et une répartition optimale de la pression..



AUTOsupportTM - Ajustement automatisé de la pression :

La pression est ajustée automatiquement tout au long du cycle de telle manière que le soutien, la position et la thérapie soient toujours maintenus à des niveaux optimaux, en réponse au poids, aux mouvements et à la position du patient. L'égalisation de la pression des cellules se fait automatiquement sans aucune intervention.


La caractéristique ODSTM (Ortho-Differential Support) de ces cellules permet d'obtenir des pressions optimales à l'intérieur des cellules, compensant automatiquement les différents IMC des patients.

Plus étroites au centre qu'aux extrémités, elles s'adaptent aux différents patients, et contiennent un différentiel de pression et de soutien intégré, permettant de supporter les patients les plus petits et légers sur la partie la plus souple au centre, et les patients les plus lourds et larges sur les extrémités.

Coussin BASETM connectable

Un coussin BASETM Sequential peut se connecter directement sur le surmatelas Overlay en tête de lit ou sur le contrôleur (avec adaptateur en option).

Mode alterné 1 sur 4 - 43 x 43 x 7 cm - 48 cellules Patients jusqu'à 130 kg.

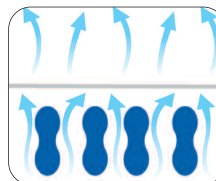

Perte d'air interne : Pendant chaque cycle, de l'air est libéré à l'intérieur du matelas, sous la housse, grâce à un réseau spécifique. Cette ventilation mécanique réduit l'humidité et aide à conserver une température ambiante au niveau de la peau du patient.



Valve CPR



Construction modulaire



Mode transport



Fonctionnement intuitif

Des boutons tactiles simples et concis et une fonction verrouillage automatique pour éviter toute activation involontaire. Des alarmes sonores ainsi qu'un écran LCD montrant les différents modes en cours ou les erreurs de fonctionnement.

PHASE FLOW™ Economie d'énergie

La pompe de contrôle de la pression ne fonctionne que selon les besoins, réduisant la consommation d'énergie, le bruit et retardant les besoins en maintenance.

Economie d'énergie

Mode soins - Gonflage maximum

Gonfle le matelas à la pression statique maximale pour 15 minutes avant de revenir au mode thérapeutique précédent, nécessaire pour certains soins quand un mode actif ne convient pas.



Réglages de confort

Permet au soignant d'adapter les réglages de confort, quelque soit le mode thérapeutique choisi, pour s'accommoder au ressenti du patient. Trois réglages disponibles : Tendre - Median - Ferme.

- Idéal pour l'hôpital et les institutions**
- Matelas entièrement lavable en machine**
- Pour patients à très haut risque Jusqu'au stade IV**
- Valve CPR**
- Deux modes Actif 1 cellule / 4 Mode basse pression continue**
- Gonflage max. Mode soins**
- AUTOsupport™ Ajustement de la pression automatique**
- Mode transport jusqu'à 12h**
- Tissu imperméable et respirant**
- Coutures soudées**
- Perte d'air intégrée**
- Passe-cable**
- Mode confort**
- Coussin connectable la thérapie 24/24h**
- Cellules ODS™**
- Modulaire maintenance facile**
- Alarmes visuelles et sonores**
- Autoverrouillage du clavier**
- 2 ans de garantie**

SENTINEL™ Bariatric Bed System



Toute l'efficacité et la technicité de TALLEY® pour la prévention des escarres pour des patients jusqu'à 420 kg.



Le Quattro™ Sentinel est destiné à la prévention et à la thérapie des escarres jusqu'aux stades III et IV avec un poids accepté du patient pouvant atteindre les 420 kg.

Ce matelas fonctionne suivant le mode Quattro™ Therapy (1/4) et il est doté de 30 cellules spéciales ODS™ avec tissu et soudures adaptés pour cette éventualité de poids. Pour lit de 120 cm.

Son contrôleur dédié est identique à ceux de nos autres Quattro™ et le matelas bénéficie de toutes les qualités de ces produits :

- fonctionnement au besoin de la pompe PHASE FLOW™
- valve CPR
- mode transport
- housse non feu
- coutures soudées, ...

