



## **iGlasses - Lunettes vibrantes verres teintés**

Ces lunettes vous permettent de vous déplacer en évitant certains obstacles.

## **TOUS LES MODÈLES**

**verres teintés**

**verres transparents**

---

### **Fonctionnalités**

Ces lunettes vous permettent de vous déplacer en évitant certains obstacles. Elles sont très simples d'utilisation. Les obstacles vous sont signalés par des vibrations.

Appuyez sur le bouton rond situé du côté droit pendant environ 2 secondes. Des bips sonores vous indiquent que les lunettes sont en marche.

Un potentiomètre situé près de la branche droite vous permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité des vibrations.

Ces lunettes sont dotées d'une batterie rechargeable sur bloc secteur ou par connexion USB.

Attention : Ces lunettes ne remplacent en aucun cas une canne blanche ou un chien guide. Vous devez parfaitement maîtriser une technique de déplacement.

Les obstacles signalés sont ceux situés à hauteur du visage. Les obstacles à ras du sol ou en hauteur ne sont pas détectés par ces lunettes.