



Darwing

La liberté naturelle du mouvement



www.aca-paramedical.com



Notre métier,
votre mobilité...

Darwing

Une révolution dans les supports de bras

Le Darwing, support de bras dynamique, a été développé pour les personnes ayant très peu de possibilité musculaire au niveau des membres supérieurs. Il offre un soutien indéniable pour les activités quotidiennes comme manger, boire, se brosser les dents, taper à l'ordinateur,...

Pas besoin de fixer l'avant-bras dans la gouttière. Le Darwing fonctionne sur base de la compensation du poids du bras. C'est ce qu'on appelle « l'équilibre du bras ». Le Darwing redonne la liberté naturelle de mouvement à l'utilisateur.

Aide au besoin

Les utilisateurs du Darwing ont encore des possibilités de préhension mais très peu de force musculaire dans les bras et avant-bras. Là où des supports de bras moins sophistiqués ne suffisent pas, le Darwing pourra permettre à ces personnes de continuer à utiliser leurs propres bras aussi longtemps que possible.

Pouvoir continuer à utiliser ses membres supérieurs est non seulement bénéfique pour la santé mais aussi pour l'estime de soi. Le Darwing fournit la force supplémentaire nécessaire au mouvement, mais pas plus. Il répond au principe « aider au besoin ».

Technologie

Le Darwing permet à l'utilisateur, grâce à un petit écran, d'ajuster lui-même la compensation qui lui est nécessaire, séparément sur l'avant-bras, le bras et l'épaule. Il permet également de bloquer séparément chaque segment du membre supérieur.

Le Darwing adapte automatiquement le degré de compensation en fonction du poids et de la position du bras. Cela donne l'impression à l'utilisateur d'utiliser la même force quand il lève la main à la bouche pour manger par exemple que quand il utilise le bras en une position basse.

En outre, le Darwing permet de faire des mouvements vers l'avant, vers l'arrière, en haut en bas mais aussi permet de faire des mouvements latéraux amples.

Le design très abouti du Darwing a été étudié pour pouvoir être bien intégré dans un fauteuil roulant.


Pour en savoir plus et voir une vidéo explicite:

www.darwing.nl

www.aca-paramedical.fr/produits/aide-membres-supérieurs/



Le darwing s'intègre bien dans le fauteuil

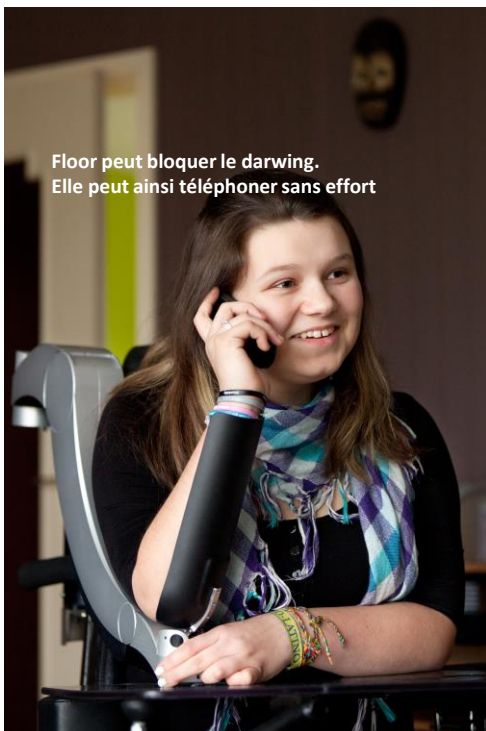

Floor peut bloquer le darwing.
Elle peut ainsi téléphoner sans effort



Le darwing permet à Floor de déplacer son
bras au-dessus du clavier, ce qui facilite la frappe

www.aca-paramedical.com



Notre métier,
votre mobilité...

Pour plus de détails sur nos adaptations, consulter nos services :
A.C.A. France - Tél : 05 56 28 52 15 - Mail : paramedical@aca-france.com

L'équipe
Une secrétaire médicale
Un technicien expérimenté
Un ergothérapeute
Un informaticien - domoticien

A.C.A FRANCE
326 avenue du Taillan
33320 EYSINES
Tél : 05 56 28 52 15
Fax : 05 56 15 58 05