

De bonnes poignées pour bouger facilement

Le FlexiMove est matelassé, confortable pour le patient.

La planche interne plastique est flexible, recouverte de nylon pour un ensemble stable et facile à utiliser dans toutes les positions.



Dessous lisse pour faciliter les transferts.

Poignées solides et confortables

Le réseau inférieur tubulaire assure une grande résistance des poignées.

L'utilisation première des FlexiMove est de remonter les patients au lit, de les y retourner et d'effectuer des transferts latéraux. Pour effectuer ces mouvements, il est plus facile de tirer que de soulever. Le dessous du FlexiMove est adapté pour glisser sans effort sur le lit.

Les FlexiMove permettent aussi de ramasser un patient au sol. Ils sont très pratiques, car ils couvrent la majeure partie du corps et se mettent en place facilement. Les poignées et le support capitonné rendent le transfert confortable.



FlexiMove maxi avec 6 poignées.




Références rapides

Les FlexiMove s'utilisent pour remonter les patients au lit, les tourner, les transférer latéralement et pour les ramasser au sol. La surface est en nylon étanche et le support a un revêtement matelassé sur une planche flexible (noyau), pour stabiliser l'ensemble.

Nettoyage et désinfection : voir en page 48

Réf.	Produit
4012	FlexiMove midi - 110 x 53 - 4 poignées
4016	FlexiMove maxi - 150 x 43 - 6 poignées

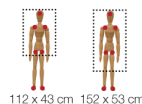

Parfois on a besoin d'un brancard pour aller jusqu'à un ... brancard.

Toutes les journées des ambulanciers sont différentes et les situations auxquelles ils sont confrontés également. Le MiniStretcher est là pour répondre aux problèmes que peuvent poser : escaliers, toilettes, espaces réduits, patients lourds avec accès réduits, ... Facile à mettre en place sous le patient, poignées solides pour résister à des patients lourds, capitonnage pour le confort du patient et pour rester sous le patient, le MiniStretcher s'adapte parfaitement à la plupart des situations et évidemment il est prévu pour être simple à nettoyer et à désinfecter.



Le MiniStretcher est étanche et lavable, pour résister au sang, aux salissures, ...



Le MiniStretcher est matelassé, confortable pour le patient et peut rester en place sur le brancard.



Support pour le cou et la tête du patient.

Surface plastifiée renforcée, facile à nettoyer.

Des poignées robustes et faciles à attraper.

Références rapides

Le MiniStretcher s'utilise pour transférer les patients vers les brancards d'ambulance. La surface est spécialement traitée pour résister aux liquides et aux fortes salissures. L'ensemble possède un coeur flexible recouvert par un matelas de confort.

Nettoyage et désinfection : voir en page 48

Réf.	Produit
4017	MiniStretcher - 136 x 64 cm

