

WALKER SUPPORT AMBULATOIRE



« Le plus dur, c'est le premier pas. »
Ce vieux proverbe prend soudain toute sa valeur lorsque les résidents doivent affronter un nouveau défi : retrouver leur capacité de marcher.

Le Walker® assure des conditions optimales pour faire les premiers pas : un environnement sûr pour le résident comme pour le thérapeute. Le Walker joue aussi un rôle de soutien important à chaque pas pendant les stades initiaux de rééducation et d'entraînement à la marche du résident.

La fonction verticale du Walker réduit les risques pendant le transfert pour le résident comme pour le physiothérapeute lors du levage ou de la descente du résident à partir de la position debout. Pendant le déplacement, l'impression de sécurité du résident est renforcée par les dispositifs prévus pour apporter un réel confort en toute sécurité : des poignées réglables pour une préhension ferme, la table de soutien en forme de U pour s'appuyer dessus et les sangles du dos/de suspension pour l'empêcher de tomber.



...with people in mind

www.ArjoHuntleigh.com

UNE GRANDE SOUPLESSE POUR LES DIVERS DÉFIS LIÉS AUX SOINS QUOTIDIENS

1 Siège en forme de bêche



Lorsque le résident est dans une position debout confortable, le siège en forme de bêche peut facilement être retiré. (Par souci de clarté, il est illustré sans le résident).

2 Poignées



Des poignées réglables offrent une tenue ferme au résident.

3 Dispositif de direction droite et freins



Un dispositif de direction droite renforce encore le Walker, ce qui permet au résident de marcher tout droit. Le Walker est équipé de roues à freins.

4 Télécommande



La version avec batterie est équipée d'une télécommande facile à utiliser qui permet au thérapeute de rester à proximité du résident.

5 Batterie



Pas besoin de mettre le Walker au poste de rangement pour le recharger. Il suffit de remplacer la batterie déchargée par la batterie chargée provenant du chargeur.

Accès



Les côtés ouverts du Walker offrent au thérapeute un accès libre aux hanches, aux genoux et aux chevilles du résident.

Sangles



Grâce aux sangles de suspension et à la sangle du dos, il n'y a pas de risque de chute pour le résident.



6 Table de soutien



La table de soutien en forme de U est douce et confortable pour s'appuyer dessus.

Information produit

Capacité de levage sûre	136 kg
Plage de course de levage	(version électrique) 565 mm (version hydraulique) 500 mm
Largeur	825 mm
Longueur maxi	(version hydraulique) 1040 mm
Longueur maxi	(version électrique) 1000 mm
Batterie (amovible et rechargeable)	24 V CC

Hauteur de table	(version hydraulique)	770 - 1270 mm
	(version électrique)	810 - 1375 mm
Hauteur du siège en forme de bêche	(version hydraulique)	360 - 860 mm
	(version électrique)	400 - 965 mm
Poids	(version hydraulique)	42,5 kg
	(version électrique)	48,5 kg

Seules les pièces détachées ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires ArjoHuntleigh, pour éviter toutes blessures. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis. © et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2011.

ArjoHuntleigh s.a.

Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • BELGIQUE •
T : +32 (0)53 60 73 80 • E : info@ArjoHuntleigh.be • www.ArjoHuntleigh.be

ArjoHuntleigh SAS

2 avenue Alcide de Gasperi, BP133 • 59436 Roncq Cedex • FRANCE •
T : +33 (0)3 20 28 13 13 • E : info.france@arjohuntleigh.com • www.ArjoHuntleigh.fr