


# Aides à la verticalisation



PM-3007 Extension Sangle de jambes

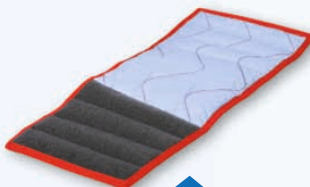

Cette Sangle de jambes s'ajuste parfaitement grâce à un large velcro.

## PM-Alpha® Sangle jambes

Code article: PM-3005  
Dim.: 100 x 22 cm  
Matériau: PES / Carbone

## PM-Alpha® Extension Sangle jambes

Code article: PM-3007  
Dim.: 50 x 22 cm  
Matériau: PES/Carbone



## PM-Alpha® Sangle de jambes

Cette sangle aide à transposer le patient dans le fauteuil roulant, aux toilettes, sur une chaise ou un siège de voiture. Elle s'associe profitablement aux planches et disques de transferts, aides à la verticalisation ou ceintures de maintien. Les transferts deviennent plus amicaux aux dos et épaules du personnel soignant.

La sangle est placée avec douceur autour des jambes du patient assis, en dessous des genoux et fermée avec le velcro. L'assistant(e) place délicatement son pied entre les pieds du patient. Durant le transfert, la sangle détermine la capacité de maintien du patient durant la phase de levage du transfert, permettant à l'assistant(e) d'exercer une contre-pression sur la sangle dans la phase de rotation et de contrôler le mouvement rotatif jusqu'à la fin de son exécution. La sangle de jambes peut être allongée de 50 cm avec l'extension PM-3007.

