

Sangle cheville
RFA17000

<RENOL CLIP>

Taille unique

paire

La fixation COMFORT ANKLE HOLDERS (fixation chevilles) est simple d'utilisation : elle immobilise tout en douceur les chevilles.

Celles-ci sont maintenues par un système velcro.

Ajustable à toutes les tailles.

Une paire par emballage avec trois sangles Nylon séparées (2.5cm de largeur).

Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

[Comment utiliser la FIXATION CHEVILLES COMFORT dans le lit.](#)

1. Passez la sangle nylon à travers la boucle de la fixation chevilles.
2. Attachez la sangle au cadre du lit.
Utilisez le système des deux boucles. (images 1,2 et 3)
3. Enroulez le velcro de la fixation chevilles autour des chevilles du patient.
4. Utilisez la troisième sangle nylon pour attachez les deux chevilles ensemble. Passez la sangle à travers la seconde boucle de la fixation chevilles. (image 4)
5. Les sangles doivent être tendues.

Image 1

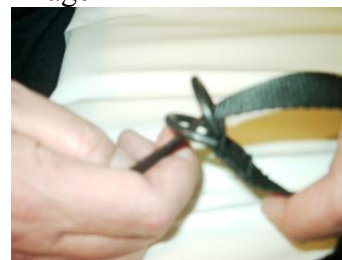


Image 2

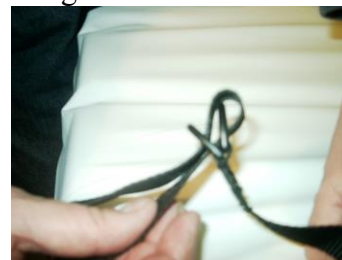


Image 3

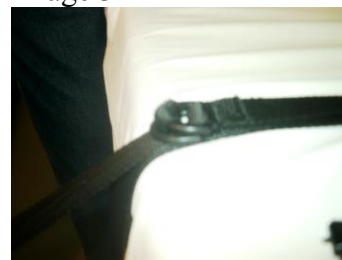


Image 4



Image 5

