



Ceinture Cheville Renol Fix RFA17550 pièce

Utilisez la SECURITY ANKLE HOLDER (fixation chevilles) pour immobiliser les chevilles du patient. La fixation chevilles ne comprime pas la circulation et procure un grand confort.

Deux niveaux de sécurité pour la fixation chevilles; le premier est un système velcro, le deuxième un système avec serrure.

Ajustable à toutes les tailles.
Une par emballage. Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

[Sélectionnez votre système de fermeture.](#)

Magnet: 4 x RFK01222



1 x RFK01111



OU Steel: 4 x RFK00433

1 x RFK00100

[Comment utiliser la FIXATION CHEVILLES SECURITY dans le lit.](#)

1. Posez la fixation chevilles sur le lit à la hauteur des chevilles du patient. (image 1)
2. Insérez les GOUPILLES dans les deux poches **bleues** de la ceinture.
3. Attachez la fixation chevilles au cadre du lit. La sangle doit être très tendue, fermez avec l'EMBOUT. (image 2)
4. Insérez les GOUPILLES dans les deux poches **noires** de la ceinture.
5. Enroulez le velcro de la fixation autour des chevilles. (image 4)
6. Passez la partie courte de la sangle à travers la boucle de la fixation chevilles. (image 5)
7. Tirez la sangle sur la GOUPILLE au-dessus de la boucle de la fixation chevilles. (image 6)
8. Serrez la sangle avant de la fermer avec l'EMBOUT, en prenant soin de ne pas couper la pression sanguine. (image 6)

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6

