



**Sangle bassin avec sangle pelvienne <RENOL CLIP>
RFC26200 Taille unique pièce**

Utilisez la SOFT WAIST AND PELVIC BELT (ceinture taille et pelvienne) pour les patients qui risquent de tomber. La ceinture pelvienne immobilise efficacement la taille et évite au patient de glisser vers l'avant. La ceinture fournit un confort et une protection pour les peaux sensibles.

Ajustable à toutes les tailles. Une pièce par emballage.
Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

[Comment utiliser la CEINTURE PELVIC SOFT avec la chaise.](#)

1. Attachez la ceinture pelvienne au cadre de la chaise avec la fixation rapide. (image 1)
2. Positionnez le patient dans la chaise.
3. Positionnez la ceinture pelvienne entre les jambes du patient et contre la taille du patient. (image 2)
4. Serrez la sangle nylon de la taille avec la fixation rapide à l'arrière de la chaise. (image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



INFORMATION BASIQUE

Lors de l'immobilisation du patient dans la chaise, n'oubliez pas la capacité du patient à soulever la chaise par lui-même.

Connectez les produits RENOL à une solide partie de la chaise. Les sangles doivent être sécurisées, elles ne peuvent glisser ou changer de position.