



**LIMB HOLDERS <RENOL FIX>**  
**RFL15000** One size pair

Utilisez la LIMB HOLDERS (fixation poignets ou chevilles) pour immobiliser les poignets ou les chevilles du patient. La fixation ne comprime pas la circulation et procure un grand confort.

Deux niveaux de sécurité pour la fixation ; le premier est un système velcro, le deuxième un système avec serrure.

Ajustable à toutes les tailles. Une paire par emballage. Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

Sélectionnez votre système de fermeture.

Magnet: 2 x RFK01222



1 x RFK01111



OU Steel: 2 x RFK00433



1 x RFK00100



Comment utiliser la LIMB HOLDERS pour les poignets dans le lit.

1. Insérez la GOUPILLE dans la poche **noire** de la ceinture. (images 1 et 2)
2. Posez la fixation sur le lit à la hauteur du poignet du patient. (image 3)
3. Enroulez le velcro de la fixation autour du poignet. (image 4)
4. Passez la partie courte de la sangle à travers la boucle de la fixation poignet. (image 5)
5. Tirez la sangle sur la GOUPILLE au-dessus de la boucle de la fixation poignet. (image 6)
6. Attachez la fixation poignet au cadre du lit. La sangle doit être très tendue, fermez à l'EMBOUT du poignet. (images 6 et 7)
7. Prenez soin de ne pas couper la pression sanguine.

Image 1



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



Image 8





**LIMB HOLDERS <RENOL FIX>**  
**RFL15000** One size pair

Select your fastening system

- Magnet: 2 x RFK01222  1 x RFK01111 
- OR** Steel: 2 x RFK00433  1 x RFK00100 

Comment utiliser la LIMB HOLDERS pour les chevilles dans le lit.

1. Insérez la GOUPILLE dans la poche **blanche** de la ceinture. (images 1 et 2)
2. Posez la fixation sur le lit à la hauteur de la cheville du patient. (image 3)
3. Enroulez le velcro de la fixation autour de la cheville. (image 4)
4. Passez la partie courte de la sangle à travers la boucle de la fixation cheville. (image 5)
5. Tirez la sangle sur la GOUPILLE au-dessus de la boucle de la fixation cheville. (image 5)
6. Attachez la fixation cheville au cadre du lit. La sangle doit être très tendue, fermez à l'EMBOUT de la cheville. (images 6 et 7)
7. Prenez soin de ne pas couper la pression sanguine.

Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7



Image 1



Image 2

