



Sangle pelvienne Renol Fix

RFP22000

Taille unique

pièce

La ceinture PELVIC utilisée conjointement avec la SAFETY LOCK WAIST BELT (**RFC47115 ou RFC47140**) évite au patient de glisser vers l'avant et assure de ce fait une sécurité supplémentaire : elle l'empêche de se coincer dans la sangle et de s'asphyxier en tentant de s'en dégager.

Ajustable à toutes les tailles. Une par emballage.

Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

[Utilisation serrures SAFETY LOCK WAIST BELT.](#)

[Comment utiliser la CEINTURE PELVIC avec la SAFETY LOCK WAIST BELT dans la chaise.](#)

1. Attachez autour du cadre de la chaise les sangles de côtés de la SAFETY LOCK WAIST BELT avec une GOUPILLE / EMBOUT. (images 1 et 2)
2. Fixez la ceinture PELVIC au velcro situé à l'arrière de la ceinture SAFETY LOCK WAIST BELT. (image 3)
3. Positionnez le patient dans la SAFETY LOCK, la ceinture PELVIC entre les jambes du patient. (image 5)
4. Avec l'EMBOUT/GOUPILLE de la SAFETY LOCK attachez les ceintures. (image 5)
5. La ceinture PELVIC doit être serrée.

[INFORMATION BASIQUE](#)

Lors de l'immobilisation du patient dans la chaise, n'oubliez pas la capacité du patient à soulever la chaise par lui-même.

Connectez les produits RENOL à une solide partie de la chaise. Les sangles doivent être sécurisées, elles ne peuvent glisser ou changer de position.



Image 2



Image 3

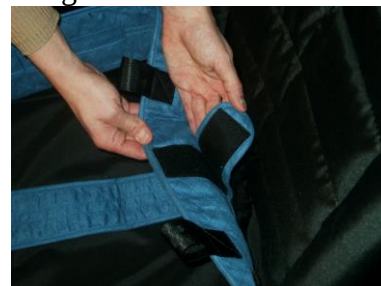


Image 4



Image 5



Image 1