



Sangle poignet
RFW16000

<RENOL CLIP>

Taille unique

paire

Simple et économique la COMFORT WRIST HOLDERS (fixation poignets), s'adresse plutôt à des patients devant être perfusés. Le maintien du poignet se fait par un système velcro.

Ajustable à toutes les tailles.

Une paire par emballage avec deux sangles Nylon séparées (2.5cm de largeur).

Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

Comment utiliser la FIXATION POIGNETS COMFORT dans le lit.

1. Passez la sangle nylon à travers la boucle de la fixation poignets. (images)
2. Attachez la sangle au cadre du lit.
Utilisez le système des deux boucles. (images 1, 2 et 3)
3. Enroulez le velcro de la fixation poignets autour des poignets. (image 4)
4. Les sangles doivent être tendues. (image 5)

Image 1

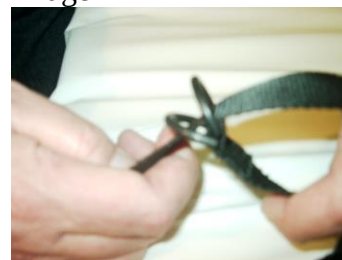


Image 2

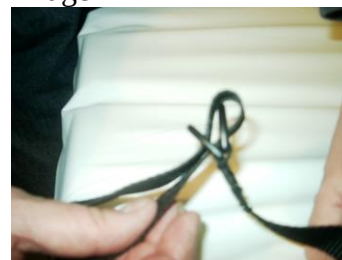


Image 3



Image 4



Image 5

