


Soulever et retourner dans le lit.



Liko™ Alaise Repo™ Original
Liko™ Alaise Repo™ Solo™

L'alaise Repo™ épargne le dos

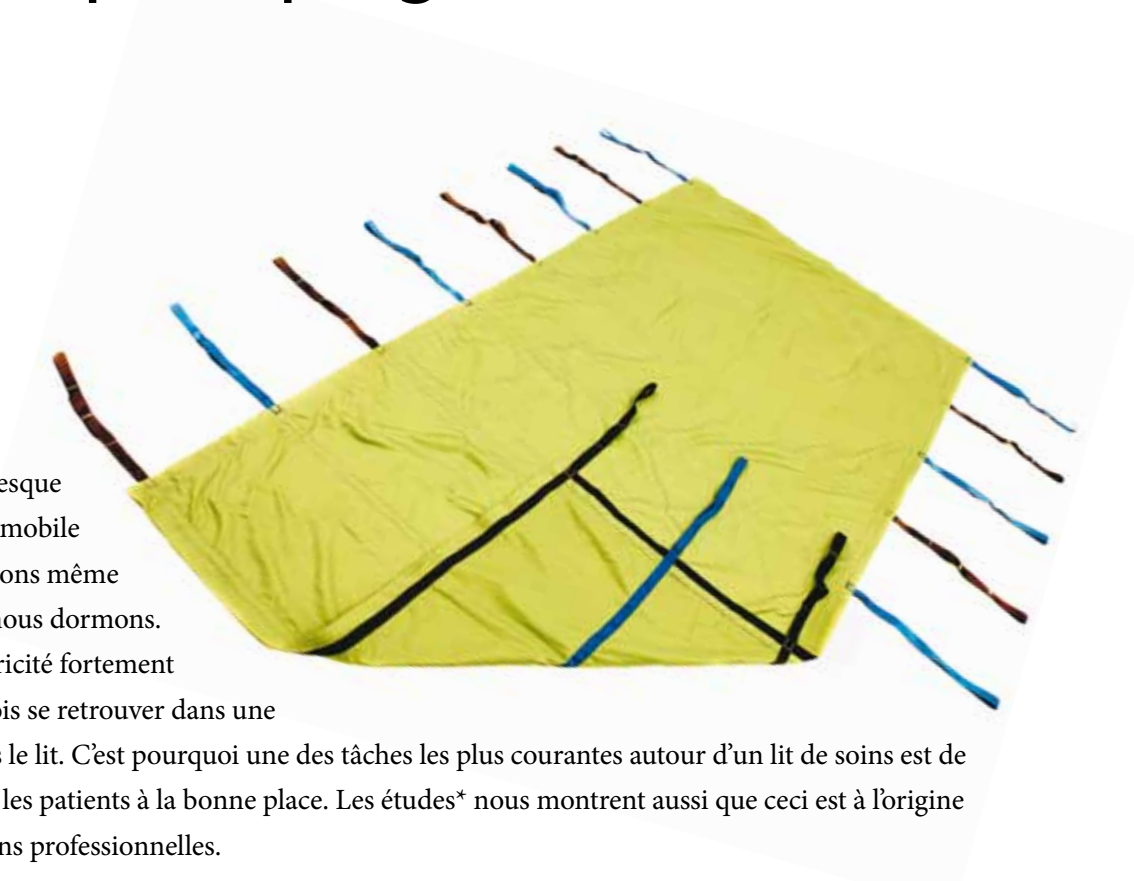

Chacun sait qu'il est presque impossible de rester immobile dans le lit. Nous ne restons même pas tranquilles quand nous dormons. Une personne à la motricité fortement réduite peut aussi parfois se retrouver dans une mauvaise position dans le lit. C'est pourquoi une des tâches les plus courantes autour d'un lit de soins est de soulever et de remettre les patients à la bonne place. Les études* nous montrent aussi que ceci est à l'origine de nombreuses affections professionnelles.

L'alaise Repo™ est un excellent moyen d'aide lorsqu'un patient doit par exemple être remonté vers la tête du lit ou être retourné. L'alaise est installée sous le patient et peut être utilisée combinée avec un drap de dessous ordinaire, ou à la place de celui-ci pendant toute la durée des soins. (L'alaise Repo™ Solo™ est systématiquement utilisée avec un drap ordinaire).

Grâce à l'alaise Repo™ et à un lève-personnes plafonnier, il devient possible pour un seul assistant de remettre un patient en place dans son lit.

Présentation du Produit

Produit	Tissu	Taille	Art. n°	Charge max.
Alaise Repo. Original	Coton/polyester	Standard	3687701	200 kg
Alaise Repo. Original	Polyester HT	Standard	3687301	200 kg
Alaise Repo. Original	Coton/polyester	Ultra	3687702	500 kg
Alaise Repo. Original	Polyester HT	Ultra	3687302	500 kg

Conseils de lavage : 85°, séchage en placard de séchage ou séchoir.

Produit	Tissu	Taille	Art. n°	Charge max.
Alaise Repo. Solo. par 10	Coton/polyester	Courte	36871003	200 kg
Alaise Repo. Solo., 2 paquets de 10	Coton/polyester	Courte	36871003-2	200 kg

Conseils de lavage:  Non lavable. Peut être recyclée par incinération.

Contactez votre représentant Liko pour des conseils et des informations sur les changements de produits.



* *The accident process preceding overexertion back injuries in nursing personel* by Inga-Lill Engkvist, BSc, Mats Hagberg MD, Eva Wigaeus Hjelm, PhD, Ewa Menchel, PhD, Lena Ekenvall MD, PROSA study group. Scand J Work Environ Health 1998;24(5):367-375.

A dynamic 3D biomechanical evaluation of the load on the low back during different patient-handling tasks by Skotte JH, Essendrop M, Hansen AF, Schibye B. J Biomech. 2002 Oct;35(10):1357-66.

Alaise Repo™ Original

L'Alaise Repo™ Original existe en deux versions : la version Standard, pour lever jusqu'à 200 kg et la version Ultra, plus robuste, pouvant lever jusqu'à 500 kg. Il est vrai qu'un transfert peut être effectué par une seule personne mais nous recommandons la présence de deux assistants pour des raisons de facilité mais aussi de gain de temps. Pour un résultat optimal, il est conseillé d'utiliser l'Alaise Repo™ Original avec un lève-personnes plafonnier.

Soulever dans le lit

Avant



Remonter les patients vers la tête du lit à la force des bras est un travail lourd et épuisant.

C'est une opération à risques qui se reproduit souvent de nombreuses fois par jour pour chaque patient.



Le patient a glissé vers le pied du lit. Il est grand temps de le relever avec l'Alaise Repo. Le lève-personnes plafonnier est positionné au-dessus du patient et les œilletons de sangles sont accrochés à l'étrier.



Quand le patient n'est plus en contact avec le lit, on le remonte facilement à l'aide de l'Alaise Repo. Le tout avec le moins d'efforts physiques possibles.

Retourner

Avant



Beaucoup de patients doivent être retournés plusieurs fois par jour, par exemple pour éviter les risques d'escarres. Même avec une bonne technique manuelle, le personnel subit une lourde charge inévitable.



Soulever d'abord le patient vers un des côtés du lit à l'aide de l'Alaise Repo. Accrocher ensuite les œilletons de sangles à l'étrier.



Retourner l'utilisateur doucement et de façon contrôlée à l'aide du lève-personnes plafonnier.

Alaise Repo™ Solo™

L'Alaise Repo™ Solo™ est une variante de l'Alaise Repo™ et est destinée à un usage à court terme. Par conséquent, elle ne doit pas être lavée mais peut être jetée lorsqu'elle est souillée ou lorsque le patient n'en a plus besoin.



Liko™ propose une vaste gamme de lève-personnes plafonniers. Likorall™ est une bonne solution parmi d'autres en association avec l'Alaise Repo™.



L'Alaise Repo™ Original est facile à placer dans le lit. Elle est confortable et peut être utilisée associée à un drap de dessous ordinaire ou à la place de celui-ci.




Soutenir le patient avec des coussins aux endroits appropriés. Décrocher ensuite l'Alaise Repo™ Original et refaire le lit.



L'Alaise Repo™ Solo™ est placée par-dessus le drap ordinaire et peut être utilisée pendant toute la durée des soins. Puisque l'étape de la blanchisserie est éliminée, la solution de l'Alaise Repo™ Solo™ est relativement économique et augmente la disponibilité des équipements d'aide en stock.



L'utilisation des produits Solo™ de Liko™ aide à éviter la propagation de virus et bactéries contagieuses, telles le SARM.

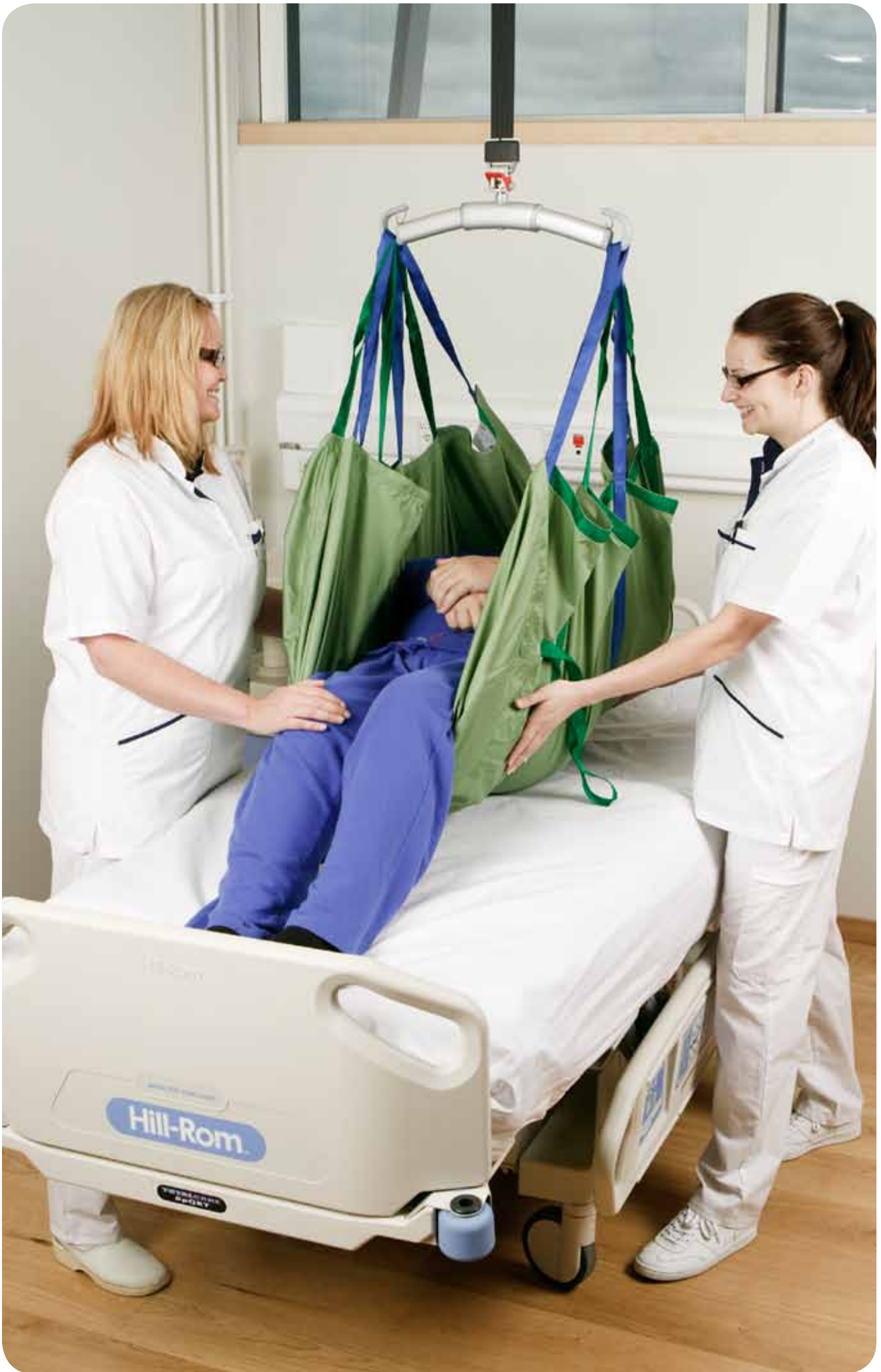

Comprendre, Développer et Adapter.

Soulever une personne nécessite à la fois de bons moyens techniques et une connaissance des complications médicales. Liko™ est spécialiste du levage et du transfert des personnes à mobilité réduite. Depuis plus de 30 ans, nous développons et fabriquons avec succès des moyens d'aides fonctionnels, sûrs et faciles à utiliser. Une grande partie de notre succès repose justement sur l'association d'une grande compétence technique, d'une connaissance médicale et de notre propre expérience de travail dans le monde médical.

L'Alaise Repo est un bon exemple illustrant la capacité de Hill-Rom et Liko™ à comprendre, développer et adapter les produits aux différents besoins du monde médical.

Hill-Rom, ainsi que le logo et le nom Hill-Rom sont des marques de fabrique ou marques déposées de Hill-Rom Services, Inc. Liko, ainsi que le logo et le nom Liko sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB. Alaise Repo Original, Alaise Repo Solo et Likorall sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB.



Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est également certifié ISO 14001 Environnement.



A **Hill-Rom** Company

Fabricant
Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Distributeur en France :
SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Distributeur en Suisse :
Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23
info@liko.ch

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les modèles, sans avis préalable. La seule garantie faite par Hill-Rom® est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2010 Hill-Rom® SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS