



Assise de décharge du nerf pudendal

Ref: dnp


Coussin pour soulager les douleurs liées aux névralgies pudendales

Description

L'assise de décharge pudendale offre une décharge totale du sacrum au périnée et permet ainsi de soulager les douleurs dues aux névralgies pudendales.

Fonctionnalités

La **névralgie pudendale** ou **syndrome d'Alcock** est une pathologie mal connue. On l'appelait aussi maladie du nerf honteux du fait de sa localisation sur le corps.

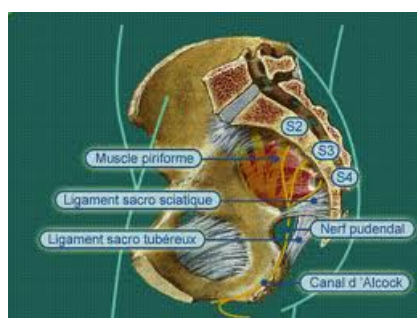

Pour une grande proportion des personnes souffrant de pudendalgie, la **posture assise n'est plus possible**. La station assise, accentuant la compression sur le nerf pudendal, rend cette **position extrêmement pénible**.

Les activités de la vie professionnelle et personnelle sont bouleversées : le travail en position assise, les repas en famille, les sorties au cinéma, etc. ne sont plus possibles.

Le coussin de décharge pudendale offre une **solution modulable** aux personnes souffrant de cette pathologie.

Il crée une véritable **décharge du sacrum au périnée** et permet un **soulagement des signes cliniques**.

Les " **pads** " de fluide composant la corolle sur laquelle s'appuient les trochanters et la face interne de la cuisse **sont amovibles**, permettant ainsi une **décharge supplémentaire** à des points précis.

Les "pads" peuvent être mis au congélateur afin d'annihiler la douleur par le froid.

Il est possible de **personnaliser le coussin** dans le cas où le modèle standard ne convienne pas tout à fait (modification de la largeur, de l'épaisseur, du tissu du produit, de la profondeur de la décharge, etc.). Veuillez nous contacter pour un devis.

Pour optimiser l'utilisation du coussin, les pieds doivent être posés à plat en position assise.

Caractéristiques

Les technologies utilisées pour concevoir ce produit sont issues du milieu médical

- Avec le fluide Haute Viscosité (HV) intégré, l'assise adopte parfaitement la morphologie de la personne.
- La housse 3D en nid d'abeille sur le dessus permet au produit de respirer, ce qui limite la sudation.

Poids

- 1.9 kg.

Dimensions

- Modèle 2037 : larg 40 cm, profondeur : 45 cm.
- Modèle 2064 : larg 36 cm, profondeur : 45 cm.
- Modèle 2065 : larg 45 cm, profondeur : 45 cm.

Une dimension et forme spécifique peut aussi être étudiée sur devis.

Housse

- tissu 3 D sur sa face externe, la face interne est antidérapante.

Nettoyage

- programme machine à 30 ° pour la housse seulement.

Attention : L'assise pudendale comportant des poches de fluides (ayant chacune une contenance plus de 100 ml), il n'est pas possible de l'utiliser dans un avion.

Garantie

- 2 ans.