



"Le partenaire idéal
pour ma vie active"
Sarah Williams

La solution adaptée à votre style de vie

Invacare **Action⁵** a été conçu pour les utilisateurs les plus actifs qui recherchent un fauteuil abordable doté de bonnes performances de conduite et simple à plier pour faciliter sa manipulation, son stockage et son transport. Avec ses deux brevets et sa conception légère, le nouveau **Action⁵** est un fauteuil sur lequel l'utilisateur peut compter. Les principales caractéristiques incluent :

- **Système de pliage unique**
- **Stabilité d'un fauteuil à cadre rigide**
- **Ajustements rapides et précis**
- **Ultra configurable**



reddot award 2015
winner



Yes, you can.®



Système de pliage unique

- La conception innovante du fauteuil permet d'avoir un **encombrement réduit** du châssis et un dossier qui se rabat facilement sur l'assise, rendant ainsi le fauteuil **compact**.
- Son système de pliage simple **facilite sa manipulation, son stockage et son transport**.



La stabilité d'un cadre rigide

- Le système de pliage horizontal en H breveté confère un **niveau de stabilité très élevé**, bien supérieur à la plupart des fauteuils pliant du marché.
- Le verrouillage automatique du système de pliage une fois le fauteuil déplié assure une position d'assise sécurisante et **améliore les performances de conduite** du fauteuil.



Ajustement rapide et précis du fauteuil sans transfert

- Notre technologie unique et brevetée permet le réglage en angle du dossier **avec l'utilisateur assis dans son fauteuil**.
- Le réglage en continu de l'angle du dossier **facilite les essais et l'adaptation du fauteuil** aux besoins de chaque utilisateur.
- L'échelle de réglage en angle du dossier est intégrée au système pour plus de précision.



Personnalisez-le !

- Donner aux utilisateurs la liberté de personnaliser le look de leur fauteuil selon leur personnalité est possible grâce aux nombreux coloris disponibles.
- L'**Action⁵** peut également **être personnalisé pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur**, en commençant par le choix entre un look actif avec un châssis à potences fixes ou bien plus de praticité avec des potences escamotables et amovibles idéales pour le stockage et le transport.
- Retrouvez dans les deux prochaines pages plus d'informations sur les nombreuses options disponibles sur l'**Action⁵**.
- L'**Action⁵** est également rétro-compatible avec d'autres produits de la gamme Invacare, y compris les kits de motorisation Alber.



Déjà primé !

- Déjà **récompensé**, le fauteuil Invacare **Action⁵** a remporté le prix Red Dot pour son design
- Le Red Dot Award n'est pas seulement le plus grand concours de produits dans le monde, il est aussi l'un des plus prestigieux prix en terme de design



reddot award 2015
winner



CONFIGURABILITÉ



POTENCES ET REPOSE-JAMBES



ACCESSOIRES



CONFIGURABILITÉ

① Assise réglable en tension et en profondeur

Ajustement rapide par système de Velcro.

② Centre de gravité

Réglable sur 100 mm par palier de 25 mm. Il est même possible de le peaufiner par palier de 12 mm.

③ Carrossage

Réglable de série à 0° ou 2°, il peut également se régler en option à 3° et 4° si nécessaire.

POTENCES ET REPOSE-JAMBES

④ Potences escamotables

Permet l'escamotage des potences vers l'intérieur et l'extérieur.

⑤ Potences fixes

Un châssis avec potences fixes à 80° est disponible pour les utilisateurs les plus actifs.

⑥ Potences et repose-jambes

Choix parmi des potences escamotables à 70°, 80° et 90°, des repose-jambes de 0° à 80° et un support amputé.

ACCESSOIRES

⑦ Dossier

Inclus une pochette de rangement et des bandes réfléchissantes pour plus de visibilité.

⑧ Roulette anti-bascule active

Peut être activée et désactivée par l'utilisateur comme par la tierce-personne.

⑨ Roues avant

Une sélection de roues avant est disponible de 4" à 7" dont certaines avec jantes aluminium et bandage souple.

ACCOUDOIRS



①



②



③

NOUVEL ACCOUDOIR RELEVABLE ET AMOVIBLE



④



⑤



⑥



⑦



⑧

ACCOUDOIRS

① Garde-boue

Les garde-boues élégants sont légers pour limiter le poids global du fauteuil au minimum.

② Accoudoir amovible et réglable en hauteur

Réglable en profondeur par coulissement sur le rail d'assise.

③ Gouttière

Apporte plus de maintien à l'utilisateur et offre plus de réglages.

NOUVEL ACCOUDOIR RELEVABLE ET AMOVIBLE

④ Nouvel accoudoir relevable et amovible

Accessible par l'utilisateur et escamotable pour faciliter les transferts

⑤ Réglage en hauteur

Un simple appui sur le bouton permet un réglage facile.

⑥ Gachette de verrouillage

Même avec des fonctions limitées au niveau de la main, l'accoudoir peut facilement être déverrouillé.

⑦ Relevable

La position de l'accoudoir une fois relevé est ajustable à l'aide d'une simple vis.

⑧ Manchette réversible

Il suffit d'inverser le sens du tube support de manchette pour passer d'une manchette courte à longue et inversement.

DONNÉES TECHNIQUES

Invacare Action⁵							
	305 / 330 / 355 / 380 / 400 / 405 / 430 / 450 / 505 / 530	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	Avant : 360- 535 mm par palier de 25 mm Arrière : 360 - 510 mm par palier de 25 mm	Dossier fixe à 90° Ou dossier réglable en continu 90° de -15° à +15°	Fixe 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Réglable en continu 360 - 400 mm et 410 - 490 mm	Potences fixes 80° Potences escamotables 70° / 80° / 90° Repose-jambes 0-80°

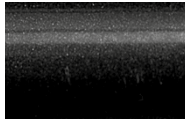
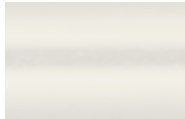
Invacare Action⁵							
	Potences escamotables : 200-510 mm Potences fixes : 300-530 mm	186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm	Largeur d'assise de +160 mm à +250 mm	320 - 380 mm	845 - 1205 mm	670 - 860 mm	701 - 1108 mm

Invacare Action⁵							
	7°	1050 - 1380 mm	100 & 130 kg	A partir de 12,3 kg	A partir de 8,3 kg		

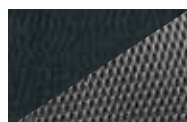


Tous nos produits sont en accord avec la norme européenne EN 12183. De plus, nos fauteuils roulants sont conformes aux normes ISO 7176-19 et ISO 10542, et ont d'autres caractéristiques assurant à l'utilisateur un niveau élevé de sécurité et de sûreté pendant son voyage dans un véhicule automobile. Toutefois, les utilisateurs de fauteuils roulants doivent se transférer sur le siège du véhicule et utiliser le système de retenue du véhicule chaque fois qu'il est possible. Pour plus d'information sur ce fauteuil roulant avant achat, merci de consulter le site www.invacare.fr. Pour plus d'informations sur les règles de bons usages du fauteuil, les réglages et le transport, merci de vous référer au manuel d'utilisation.

COLORIS DE CHÂSSIS

					
Rouge foncé	Bleu Pop	Noir Anthracite	Blanc Perle	Vert Électrique	Violet Hypnotique
					
Gris Perle	Noir Mat	Jaune Intense	Orange Vibrant		

TOILE DE DOSSIER



Nylon Noir /
Mesh Gris

COLOUR ACCENTS

		
Gris	Bleu	Violet

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2015 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Indications données à titre
d'information (information non
contractuelle).
Invacare se réserve le droit de
modifier sans préavis les données
techniques ou de présentations
de ce produit.

Action5 - FR - 05/2015 - 1589973



Yes, you can.®