



### Sangle de bassin <RENOL CLIP>

RFC26100

One size

pc

Utilisez la SOFT WAIST BELT (ceinture taille) pour chaise afin de maintenir la position du patient et réduire le risque de glissement.

Ajustable à toutes les tailles. Une pièce par emballage.  
Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

#### [Comment utiliser la CEINTURE TAILLE SOFT avec la chaise.](#)

1. Serrez la ceinture taille autour du patient et de la chaise.
2. Connectez la sangle à une solide partie de la chaise. Les sangles doivent être sécurisées, elles ne peuvent glisser ou changer de position.
3. Fermez la ceinture taille avec la fixation rapide.

#### INFORMATION BASIQUE

N'oubliez pas la capacité du patient à soulever la chaise par lui-même.

Lors de l'immobilisation du patient dans la chaise, avec l'utilisation de la ceinture RENOL TAILLE et EPAULES nous préconisons l'usage d'un **coussin RENOL Abduction** (RCV07100) ou une **ceinture RENOL Quick** (RFL40000 ou RFL45000) pour éviter tout glissement vers l'avant et un possible étouffement du patient avec sa sangle.

Connectez les produits RENOL à une solide partie de la chaise. Les sangles doivent être sécurisées, elles ne peuvent glisser ou changer de position.

Image 1



Image 2

