



Ceinture fauteuil confort avec clip arrière

RFC45115 **Small** / **Med** COMFORT (tour de taille 60 à 110cm) pc

RFC45135 **Large** COMFORT (tour de taille 90 à 130cm) pc

Les ceintures abdominales de la gamme **SAFETY** ont la particularité d'entourer complètement la taille. Elles renforcent ainsi la sécurité d'assise dans le fauteuil puisqu'elles préviennent entièrement tout risque de glissement hors de celui-ci.

Offre un grand confort de par **la largeur de la sangle (14cm)**. Les points de pression sont davantage répartis et la sensation « d'écrasement » s'en trouve diminuée.

Le concept permet de laisser en permanence la ceinture fixée à la chaise. La rapidité d'usage est ainsi garantie : il suffit d'installer le patient et de le maintenir en fixant la sangle autour de sa taille.

Disponible en deux tailles. Une pièce par emballage.
Lavable en machine.



Toutes les instructions d'entretien sont précisées sur les produits.

[Comment utiliser la ceinture taille SAFETY avec la chaise roulante ou gériatrique.](#)

1. Attachez autour du cadre de la chaise la sangle nylon noire de la ceinture SAFETY avec la fixation rapide.
2. Positionnez le patient dans la chaise.
3. Entourez et fermez grâce au velcro la ceinture SAFETY bleue autour de la taille du patient.
4. Passez la deuxième sangle nylon noire de la ceinture taille à l'arrière de la chaise, fermez avec la seconde fixation rapide.

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5

