



DOUCHE AU LIT

DOUCHE AU LIT est conçu pour la douche ou le bain des personnes alitées en collectivité ou à domicile.

DOUCHE AU LIT a été développé avec l'objectif de faciliter l'utilisation pour les soignants et d'améliorer le confort des patients.



FLEXIBLE

Il n'y a pas besoin de remplir de cuve ou de brancher le système. Il suffit juste de changer le flexible de douche. (flexible de 5M de long, avec possibilité de rallonge).



DEBITMETRE

Avec notre débitmètre vous pouvez consulter la quantité d'eau utilisée mais également contrôler la température de l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS : 88 x 188cm Côtés 26cm + 9cm pour les rabats

9 RAISONS DE CHOISIR LES MATELAS DOUCHE AU LIT

- Simple d'utilisation
- Mise en place rapide
- Pas de cuve à transporter
- Pas de système électrique ni de batterie
- Contrôle de la température
- Contrôle du débit
- Matelas résistant et confortable
- Possibilité de prendre une douche ou un bain

Si vous avez utilisé:

- **Moins de 23L:** vous pouvez insérer le tuyau d'évacuation de 1m50 dans le réservoir pour l'eau sale.
- **Plus de 23L:** vous devez utiliser le tuyau d'évacuation de 5m et évacuer l'eau sale dans le siphon de la salle de bain.

DOUCHE AU LIT LA SIMPLICITÉ EN 4 ÉTAPES.

ETAPE 1 changez le flexible de douche

ETAPE 2 contrôlez la température de l'eau dans la salle de bain avec notre débitmètre.



ETAPE 3 positionnez votre matelas sur le lit



ETAPE 4 si vous souhaitez donner un bain, il vous suffit de mettre en place le bouchon pour empêcher l'évacuation de l'eau.

ETAPE 5 Utilisez notre douchette à gâchette pour donner la douche ou le bain à votre patient.



ETAPE 6 Retirez le bouchon d'évacuation.

