

Le déambulateur RCN - en mouvement !

Meilleure qualité de vie

Prophylaxie des chutes

Indépendance

Mobilité

Sécurité



Rester mobile plus longtemps !

Le déambulateur RCN offre à la personne à mobilité réduite une sécurité incomparable dans la progression de la marche. Ce déambulateur a été conçu spécialement en vue de motiver la personne à mobilité réduite à s'entraîner à la marche. Les patients à risque de chutes y trouvent une excellente aide à la marche en toute sécurité. Le GW 120 présente un outil de travail indispensable dans le domaine de la kinésithérapie. Il encourage la personne susceptible de chuter à plus

d'autonomie dans ses déplacements. Le cadre avec barre et ceinture de sécurité ainsi que le siège rembourré rassurent l'utilisateur lors de ses déplacements. Le patient apprécie la possibilité de s'asseoir, après chaque effort physique, avant de reprendre la marche avec le GW 120. Cette possibilité a un impact très positif sur le patient et permet d'éviter des fixations. Le GW 120 se situe entre le déambulateur classique et le fauteuil roulant.

Quelques simples gestes permettent de préparer le déambulateur pour chaque utilisateur.



Avant d'installer la personne, veuillez mettre les freins à l'arrêt, ouvrir la ceinture et la barre de sécurité.

Ensuite, la personne peut se mettre en position afin que l'on puisse régler la hauteur adaptée à sa taille.



Après le bon réglage de la hauteur, veuillez fermer la barre de sécurité et installer la ceinture de sécurité d'une manière tendue pendant que l'utilisateur est assis confortablement.

Les premiers essais doivent se faire en compagnie de personnel qualifié. Celui-ci décide ensuite, si la personne puisse se déplacer seule ou accompagnée.

Caractéristiques du produit et des options



Couleur tissu et mousse polyuréthane : voir nuancier RCN pages 82 et 83



Cadre de sécurité en résine de synthèse



Barre de sécurité



HV Hauteur réglable en sept positions à intervalles de 2,5 cm



GGP Rembourrage de la ceinture de sécurité (en option)



GKGW Coussin de gel avec housse (en option)



GL Patins évitant le déplacement incontrôlé (en option)

Walker RCN : Modèle GW 120



Modèle GW 120 :

- Rassure l'utilisateur, permet plus d'autonomie et de qualité de vie
- Aide à éviter des fixations

Equipement :

- Assise en mousse polyuréthane
- Barre et ceinture de sécurité
- Cadre de sécurité
- 6 roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm, 4 à blocage total, non-tachantes
- Réglage de la hauteur en 7 positions de 2,5 cm
- Grande pochette de rangement accrochée de côté
- Charge maximale 150 kg



Variantes de modèles

GW 120 AFS

Identique au déambulateur GW 120 avec une option supplémentaire :

- Protection par-choc AFS



Protection par-choc
AFS



GW 120 Mini

Modèle pour personnes menues

- Taille jusqu'à 155 cm
- Assise souple en tissu ferme hydrofuge



GW 120 Maxi

Modèle pour personnes fortes

- Charge maximale 200 kg
- Assise souple en tissu ferme hydrofuge



Combo-Walker CW 300

Cette aide à la marche est notamment utilisée chez des patients qui n'arrivent plus à s'appuyer à l'aide des mains. Le support rembourré permet de poser les avant-bras jusqu'aux coudes et de se tenir avec les deux mains. En cas de besoin, une ceinture avec siège intégré permet de se reposer et de reprendre la marche en alternance. Le cadre supérieur est réglable en hauteur : de 1020 à 1170mm par palier de 25mm. Options sur demande.

