

Titre du produit : Planche de transfert buffalo 150

Aucune
image
disponible

Résumé

- Pour le transfert d'une personne assise
- Multiples transferts : siège, voiture, lit, fauteuil roulant, toilettes
- Facilement transportable
- Stable et sécurisante
- Poids max supporté : 150 kg
- 2 variantes: avec surfaces antidérapantes (surfaces grises sur la photo) ou sans.



Liste des prix

Modèle : Avec grip antidérapant

79,00 €

Modèle : Sans grip antidérapant

79,00 €

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen

videos : ljpT2c0NEjk

Longueur : 77 cm

Couleur : Jaune

Largeur : 32,5 cm

Poids : 1,25 kg

Poids max. supporté : 150 kg

Matière : Synthétique

Epaisseur : 0,40 cm

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Aide au transfert

Fabriqué en : Italie

Catégories GAdS : MO Aide au transfert

Description

Buffalo 150, une planche de transfert stable et sécurisante

- La planche de transfert Buffalo est idéale pour le transfert assis d'une personne à mobilité réduite ayant des difficultés à se déplacer. Elle est facilement transportable grâce à sa poignée. La planche Buffalo est idéale pour les transferts vers un lit, un fauteuil roulant, un siège, un siège de voiture et des toilettes.
- Les 2 encoches permettent de stabiliser la planche et ainsi de sécuriser le transfert. L'encoche permet de bloquer la planche au niveau d'un accoudoir par exemple.
- La planche est à la fois légèrement flexible et résistante

Pourquoi existe-t-il le modèle avec ou sans surface antidérapante?

- le modèle antidérapant va venir apporter plus d'accroche et donc de stabilité lors de transfert si la personne réalise sa translation avec pas mal d'à-coups ce qui peut avoir tendance à faire bouger la planche.
- le modèle sans antidérapant va permettre de l'installer ou de la retirer plus facilement de sous les fesses : ce qui peut être la difficulté n°1 chez certaines personnes pour l'utilisation de la planche de transfert.

Comment utiliser la planche de transfert Buffalo ?

Transfert vers un siège : Placez-vous le plus proche possible du bord du siège, positionnez la planche au niveau de l'accoudoir du fauteuil roulant et de l'accoudoir du siège puis assurez-vous que la planche soit bien stable avant le transfert.



Transfert vers la voiture : Placez-vous le plus proche possible du bord du siège de la voiture, positionnez la planche au niveau de l'accoudoir du fauteuil roulant puis assurez-vous que la planche soit bien stable avant le transfert.



Transfert vers le lit : Placez-vous le plus proche possible du bord du lit, positionnez la planche au niveau de l'accoudoir du fauteuil roulant et assurez-vous que la planche soit bien stable sur le matelas avant le transfert.



Transfert vers les toilettes : Positionnez la planche au niveau de l'accoudoir du fauteuil roulant et assurez-vous que la planche soit bien stable sur le matelas avant le transfert.



Caractéristiques techniques de la planche de transfert Buffalo :

DIMENSIONS :

Longueur : 77 cm

Largeur : 32,5 cm

Épaisseur : 0,4 cm

POIDS :

Poids : 1,23 kg

Poids max supporté : 150 kg

MATIÈRE : fibre synthétique

COULEUR : jaune

ENTRETIEN : Nettoyage par essuyage avec un chiffon humide (ne pas nettoyer avec des produits corrosifs)

[Voir toutes les planches de transfert.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me transférer.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.](#)