



Zono 2 est une souris sans fils gyroskopique destinée aux personnes en situation de handicap et étudiée pour piloter un PC/tablette/smartphone à l'instar d'un périphérique de souris classique. Ce dispositif médical est clipsable sur une branche de paire de lunettes, au poignet, pied ou toute autre partie mobile du corps, et contrôle le curseur de l'écran de manière intuitive grâce au mouvement.

Description

- Souris gyroskopique USB sans fil
- Compatible « gaming »
- Commande à mouvement de tête
- **Dispositif médical certifié**
- Paramétrage personnalisé

Garantie panne 2 ans

Services CENOMY

Installation
Formation
Assistance technique
SAV

Zono 2, une version améliorée

- ✓ Gestes intelligents pour activer des fonctionnalités telles que la pause et le centrage du curseur, et le défilement (scrolling)
- ✓ Kit de montage pour la tête
- ✓ Licence du logiciel Quha Dwell pour Windows 10
- ✓ Temps d'utilisation de la batterie X2 entre les recharges
- ✓ Fonctionnalité de contacteur configurable

Zono 2, un système de souris adaptée aux personnes ayant des difficultés à utiliser une souris d'ordinateur classique, et qui ne nécessite pas de pastilles sur le front.



Détail

Accessoires		
	Souris Quha Zono 2	✓
	Clip lunettes	✓
	Récepteur USB	✓
	Kit de montage de tête un accessoire	✓
	Adaptateur de bouton stéréo	✓
	Adaptateur pour 2 contacteurs	✓
	Câble de charge USB	✓
	Logiciel de clic automatique PC Quha Dwell + guide rapide	✓
	Manuel d'utilisation	✓
	Carte de garantie	✓
Compatibilité systèmes d'exploitation		
	Windows	✓
	Mac OS	✓
	Chrome OS	✓
	Linux	✓
	Android	✓
	iPad OS	✓
	IOS 13 et +	✓
Compatibilité multimédia		
	PC	✓
	Tablettes	✓
	Smartphones	✓

- Les mouvements intuitifs de la tête se traduisent par le mouvement du curseur à l'écran
- Périphérique Plug and Play, aucune installation de pilote
- Précision avec de petits mouvements de tête
- Accessibilité :
 - Clic automatique (temporisation)
 - Contacteur physique avec une fiche 3,5 mm,
- Plusieurs options de port de fixation (tête, poignet...)
- Léger, facile à utiliser pendant de nombreuses heures
- Batterie rechargeable. Le temps d'utilisation de la souris entre les recharges est de plusieurs jours
- Liberté de se déplacer lors de l'utilisation de l'ordinateur ou de l'appareil mobile
- Paramètres réglables pour :
 - Vitesse du curseur et réglage indépendant de la sensibilité horizontale/verticale
 - Filtrage des tremblements
 - Définir les fonctions des contacteurs externes



Caractéristiques

Alimentation - autonomie	Chargeur UB – 60h d'autonomie
Batterie	Li-Po 240mAh
Taille	59 x 33 x 15 mm
Poids sans oculomètre	23 g
Dispositif médical	Certifié EC Directive 93/42/EEC – classe médicale 1

Références

Code référence	Désignation	Garantie incluse
7H75B	Quha Zono 2	Garantie panne 2 ans
Accessoires		
7H7502	Adaptateur micro USB OTG	
7H7503	Sento – contacteur au souffle adaptable	
Logiciels		
7E30	Grid 3 (1 +1 activation)	
7E30	Communicator 5 (3 activations)	
7E20	Look To Learn	
7E26	Extension Scenes & Sounds pour Look To Learn (1 activation)	
7104	Courbe d'apprentissage	
Services CENOMY		
ATCO	Assistance Technique 2, 3, 5 ans	
ZZMISES2	Mise en service et initiation sur site avec ou sans logiciel de communication	

CENOMY France

6-8 Rue de Bastogne 21 850 SAINT-APOLLINAIRE

info@cenomy.com

03 80 78 42 20

Consultez l'ensemble de nos produits sur
www.cenomy.shop



Suivre l'actualité Cenomy
[newsletter](#)

Évaluations et devis gratuits – Formations service.commercial@cenomy.com | Assistance technique – SAV support@cenomy.com

www.cenomy.fr

