



Gamme Auto-Agrippante Ceinture ventrale et Ceinture pelvienne

Gamme AUTO-AGRIPPANTE : gamme réunissant les principes du maintien et de l'immobilisation du patient au fauteuil. Elle assure le confort et le respect du patient, la sécurité dans l'utilisation et la facilité à mettre en place.

Ceinture ventrale				
	Dimensions (en cm)*			
	Taille	a	b	c
07.1580	1	18	125	20
07.1582	2	18	145	20
07.1585	3	18	175	20

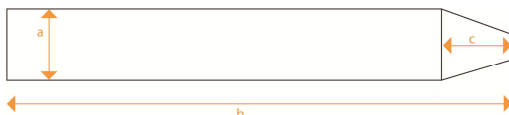

*Dimensions données à titre indicatif

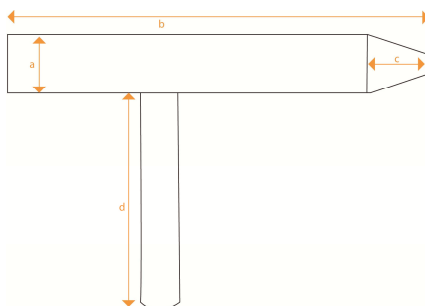

Ceinture pelvienne					
	Dimensions (en cm)*				
	Taille	a	b	c	d
07.1661	1	18	125	20	90
07.1666	2	18	145	20	100
07.1671	3	18	175	20	100

*Dimensions données à titre indicatif

Conseils d'installation :

1. Défaire les bandes auto-agrippantes
2. Placer la ceinture
3. Fixer les bandes auto-agrippantes à l'arrière du fauteuil, en fonction de la morphologie du patient
4. Pour la ceinture pelvienne, faire passer la sangle entre les jambes et sous le fauteuil et la fixer sur la ceinture à l'arrière du fauteuil.

Limite d'utilisation : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Attention : la fixation directe des bandes auto-agrippantes sur la maille grattée altère le produit !

Composition :

- Maille grattée sur mousse Polyuréthane avec envers bouclette
 - Maille grattée : 100% Polyester
 - Mousse : 100% Polyuréthane - 20kg/m³
 - Bouclette : 80% Coton et 20% Polyamide
- Biais : 100% Coton
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon

Entretien :



Séchage à l'air ambiant préconisé – Fixer les bandes auto-agrippantes avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.