

Transfert du lit au fauteuil avec ceinture abdominale et sangle debout

La ceinture offre une position de travail ergonomique et peut aussi être portée par le personnel soignant afin de stimuler le patient tout en contrôlant son déplacement.

La ceinture Maxitrans Support est aussi très complémentaire lorsqu'elle est utilisée avec les autres produits de transfert de la gamme ligne rouge®.

Cette ceinture, placée en dorsale ou sous fessier, permet les rehaussements et les voltes.



▲ Le patient prend appui sur la ceinture abdominale



▲ La sangle debout est placée sous fessier. Le matelas de glisse amorce le transfert



▲ Le respect de la trajectoire du déplacement spontané est la clé du transfert



▲ La soignante positionne son pied entre ceux du patient. La rotation du disque est sollicitée par une action en talon-pointe qui génère la rotation du disque

Transfert voiture

Pour aller en promenade ou visiter sa famille, le patient peut avoir besoin de se déplacer en voiture. Le transfert nécessite des connaissances ergomotrices et des aides techniques adaptées



▲ la planche de transfert est positionnée entre le siège et le fauteuil, freins serrés



▲ Le patient prend appui sur sa main et glisse sur la planche

Transfert autonome avec planche

Transfert aidé avec disque



▲ Positionnement du fauteuil, le disque de rotation sol est placé devant le fauteuil



▲ La soignante sollicite l'aide de la personne qui prend appui sur l'accoudoir du fauteuil



▲ Transfert par pivot, le disque de rotation sol facilite le pivotement et le transfert

Coussin unidirectionnel

Evite à la personne de glisser en position assise et facilite le rehaussement

PRAXIS Medical Technologies, spécialiste du transfert et du déplacement des personnes à mobilité réduite a profité de son savoir-faire historique et de sa grande expérience, pour développer une gamme d'aides techniques particulièrement performantes et s'adaptant à de nombreuses situations.

praxis
medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France

Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39

e-mail : info@praxismedical.com - <http://www.praxismedical.com>

CACHET DISTRIBUTEUR

De l'ergomotricité à l'ergonomie

De nombreux soignants souffrent en permanence de troubles musculo-squelettiques dues aux efforts répétés, lors des opérations de déplacement et de transfert des personnes en perte d'autonomie.

L'utilisation des aides techniques est recommandée pour tous les services, y compris les services de soins intensifs, lors d'hospitalisations ou de phases de rééducation fonctionnelle, pour une utilisation partielle ou permanente concernant des pathologies évolutives ou en gériatrie.

Pour ces dernières personnes en perte d'autonomie

et atteintes du syndrome de régression psychomotrice, l'utilisation des aides techniques dans la prévention et le traitement de ces troubles a permis un net progrès des procédures de prise en charge.

Les aides techniques sont des outils d'accompagnement qui apportent aux patients une qualité de soins incomparable.

Transfert du lit au fauteuil avec planche et disques de rotation



Les transferts lit fauteuil, les passages du fauteuil aux toilettes ou à la voiture sont des tâches fréquentes. La planche sert de passerelles ou de banquette pour les personnes sans appui sur les membres inférieurs.

La planche possède une face supérieure parfaitement lisse et glissante et une face inférieure anti-dérapante.



Les disques



▲ Après avoir isonivé le lit au fauteuil, le patient s'assied sur le bord du lit et positionne la planche



▲ Le patient prend appui sur ses poings et se prépare



▲ la planche respecte par sa forme la trajectoire courbe du déplacement

*Transfert
en mode
autonome*

*Transfert
en mode aidé*



▲ Positionnement de la planche de transfert, le lit est légèrement plus haut que le fauteuil



▲ Le patient prend appui sur ses poings et la soignante positionne son pied sur le disque



▲ Le transfert devient alors économique et sécuritaire pour le patient et la soignante

Le réhaussement dans le lit

Le réhaussement dans le lit est l'une des tâches les plus fréquentes permettant d'assurer un meilleur confort et une position optimale dans les phases de soins.

Le degré d'autonomie de la personne, sa pathologie, ainsi que les fonctionnalités du lit et les accessoires disponibles déterminent le choix de l'aide technique : drap, coussin ou matelas de réhaussement.

Le nombre et la disponibilité du personnel soignant sont également des contraintes de choix des aides à utiliser.

Les draps de réhaussement



▲ La taille du drap de glisse permet de prendre en charge la totalité du corps



▲ Les soignantes effectuent un effet de balancelle par inversion de fente

Mode passif et contrôlé



▲ Le drap de glisse, plus petit, facilite le réhaussement du haut du corps lorsque le patient participe activement avec ses membres inférieurs

Les matelas de réhaussement : **Maxisoft®**, **Medisoft®**, **Minisoft®**



▲ Lorsque le patient peut aider, la soignante respecte le déplacement spontané en faisant prendre la poignée en supination



▲ P



▲ P

Réhaussement en mode aidé 1 opératrice

Réhaussement en mode passif 2 opératrices



▲ Installation et positionnement du matelas de réhaussement



▲ les soignantes se campent en fente latérale fléchie anticipée et se préparent



▲ A l'aide des 2 cuillères fessières et scapulaires, le réhaussement s'effectue par simple inversion de fente

Il est aisé d'enlever le matelas de glisse par simple prise en pronation de son bord inférieur et « glisser » vers la soignante



Le matelas de réhaussement molletonné glisse sur lui-même verticalement sur le plan d'allongement

Le transfert en position allongée

Les aides techniques utilisées peuvent être souples ou rigides suivant les configurations des supports et la pathologie des patients. Le **Maxitrans®** et le **Trans'Gliss®** facilitent le transfert des patients lourds et difficiles à manipuler. Tous les systèmes proposés sont radiotransparents.

Les draps de glisse

*Mode passif
2 opératrices*



▲ Grace à l'utilisation du drap de translation, translater couché devient non pondérale



▲ Préparation et étalement du drap de glisse



▲ le drap est glissé le plus possible sous le corps du patient en position latérale

Les matelas de transfert molletonnés : **Maxitrans®**, **Meditrans®**, **Minitrans®**

Ils sont constitués de nylon spécialement fabriqués et traités pour diminuer les frictions et apporter une qualité de glisse exceptionnelle pour tous les transferts entre des supports horizontaux de même niveau.

Le **Minitrans®**, peut être utilisé comme coussin pivotant par un mouvement rotatif de glisse sur lui-même. Il est conseillé en cas de lombagie et de prothèse de hanche et recommandé pour les personnes humides ou nues.



▲ Minitrans®



▲ Maxitrans®



▲ Préparation du transfert



▲ Le **Maxitrans®** glisse sur lui-même transversalement sur le plan d'allongement



▲ M


*Mode passif
2 opératrices*

La planche de transfert rigide **Trans'Gliss®**

Utilisable pour tous les transferts entre 2 supports horizontaux, même avec un dénivelé important et un espace entre les supports.

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont très complémentaire et particulièrement choisis pour assurer une glisse exceptionnelle.

Plusieurs dimensions permettent de s'adapter à toutes les situations ; de l'utilisation par les premiers secours en ambulance, jusqu'aux transferts en bloc opératoire pour des patients avec perte de conscience. Compacte, pliable et facile à transporter, aisée à nettoyer et désinfecter, les planches sont très appréciées.

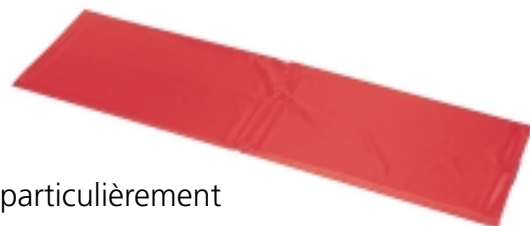

▲ Le patient est latéralisé afin de positionner le Trans'Gliss au plus près du corps



▲ Le patient est ramené sur le dos



▲ Les soignantes favorisent le transfert par poussée rasante pour l'une et attitude enveloppante pour l'autre

*Mode passif
2 opératrices*