



## DL231 - DL233 - DL234 - DL235

### GRIPPIT 2000

#### ➤ **Pour les droitiers :**

Glisser le Grippit 2000 sur l'index droit. Vous devez le porter comme une bague. Insérer ensuite le stylo ou le crayon dans la partie prévue à cet effet. Si le Grippit 2000 est trop serré ou trop large, vous pouvez ajuster la taille en le serrant ou le tirant sans risque de le casser. Il peut revenir également à sa taille d'origine.

Le Grippit peut être porté sur n'importe quel doigt selon le confort de chacun. Plusieurs tailles sont disponibles selon la taille du doigt.

#### ➤ **Pour les gauchers :**

Le Grippit 2000 peut être porté sur le pouce de la main gauche ou si cela n'est pas confortable, il peut être glissé sur l'index gauche. Le stylo doit alors être ajusté pour avoir un angle approprié.

Vous pouvez également ajuster la taille de la bague selon votre convenance comme cela est expliqué plus haut.

---

Distribué en France par HOP'TOYS – CS 10029 – 34973 LATTES Cedex



Tél. 04 67 13 81 10

Fax : 04 67 13 81 14

hoptoys@hoptoys.com